


AssistUK **Agismus**

Interaktionsseitensets – gemeinsam spielen, nicht alleine.

Anleitung für Grid 3 (Windows) und Grid for iPad (iPadOS) · Fassung 1 · Stand August 2026

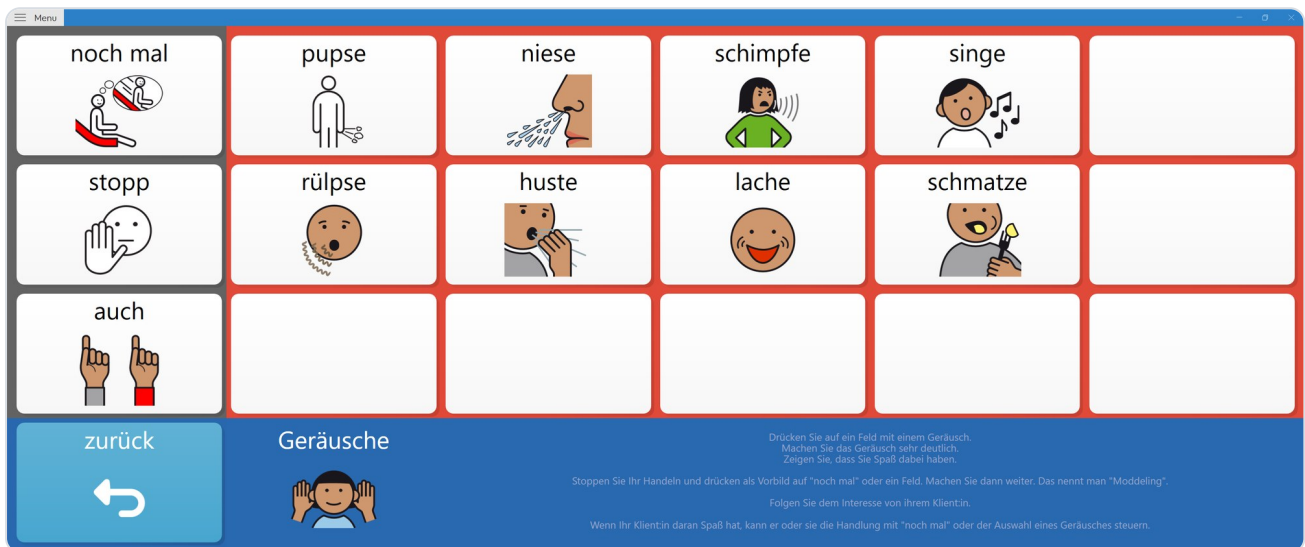

INHALT

Was Agismus ist	3
Für wen Agismus passt	3
Was Sie brauchen	3
Agismus laden	4
Grid 3 (Windows)	4
Grid for iPad	6
Aufbau: Die Spielbereiche	10
Die Steuerfelder: noch mal, stopp, auch	10
Die Spielhinweise auf der Seite	10
So gelingt das Spiel	12
Anpassen	13
Grid 3 (Windows)	13
Grid for iPad	16
Wenn etwas nicht funktioniert	19
Hilfe und Kontakt	20
Mehr erfahren	21

WAS AGISMUS IST

AssistUK Agismus ist eine Sammlung interaktiver Spiele-Seitensets für Menschen, die Unterstützte Kommunikation (UK) nutzen. Das Besondere: Bei Agismus wird **gemeinsam** gespielt – nicht alleine gegen das Gerät. Wer gemeinsam spielt, hat einen Grund zu kommunizieren: Wünsche äußern, Entscheidungen treffen, jubeln, protestieren, verhandeln.

Interaktionsspiele schaffen motivierende Situationen, in denen Kommunikation natürlich entsteht – nicht als Übung, sondern als echtes Miteinander: Blickkontakt, Abwechseln, aufeinander Reagieren, gemeinsame Aufmerksamkeit auf dieselbe Sache. Agismus ist kein Therapiematerial – es ist ein Weg zu echter Teilhabe.

Kurz gesagt. Agismus liefert fertige Spiele, bei denen Kommunikation von selbst entsteht – weil man zu zweit spielt.

Für wen Agismus passt

Agismus richtet sich an Menschen,

- die auf jeder Stufe der Kommunikationsentwicklung stehen können – von einfachen Ursache-Wirkungs-Spielen bis zu komplexeren Spielen,
- die im Alltag zu wenige echte Interaktionssituationen erleben,
- die Freude an gemeinsamem Tun haben – oder sie entdecken wollen.

Agismus richtet sich an ein Umfeld, das mitspielt: Familie, Assistenz, Kita, Schule, Wohngruppe. Die Spielhinweise stehen direkt auf den Seiten – wer das Seitenset öffnet, kann sofort loslegen.

Was Sie brauchen

Software	Grid 3 (Windows) oder Grid for iPad
Lizenz	AssistUK-Lizenz
Symbole	METACOM (Annette Kitzinger)
Bezug	über REHAVISTA und deren Partnerfirmen
Und vor allem	eine zweite Person, die mitspielt


Sprache. Agismus gibt es nur auf Deutsch. Die Symbole sind international verständlich, die Wörter und ihre Anordnung folgen aber dem Deutschen.

AGISMUS LADEN

Grid 3 (Windows)


Die Inhalte von AssistUK werden weiterentwickelt, ergänzt und online zur Verfügung gestellt. Bei bestehender Internetverbindung laden Sie Agismus direkt in der Software.

- 1 Das Gerät mit dem Internet verbinden. Auf **Meine Seiten** gehen (1), oben das Menü öffnen (2) und **Seitensets hinzufügen** (3) wählen.

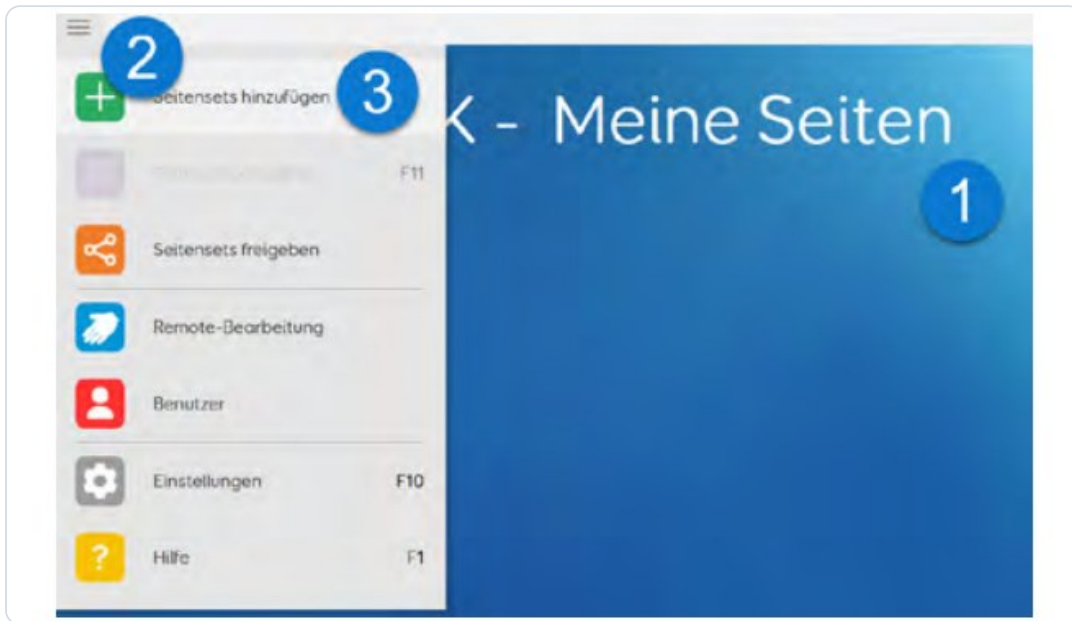


Über das Menü auf „Meine Seiten“: „Seitensets hinzufügen“

- 2 Einen Moment warten. Bei bestehender Internetverbindung und eingestellter Sprache **Deutsch** (Deutschland) erscheint das Feld **AssistUK** (1). Das Feld auswählen und auf **weiter** (2) klicken.

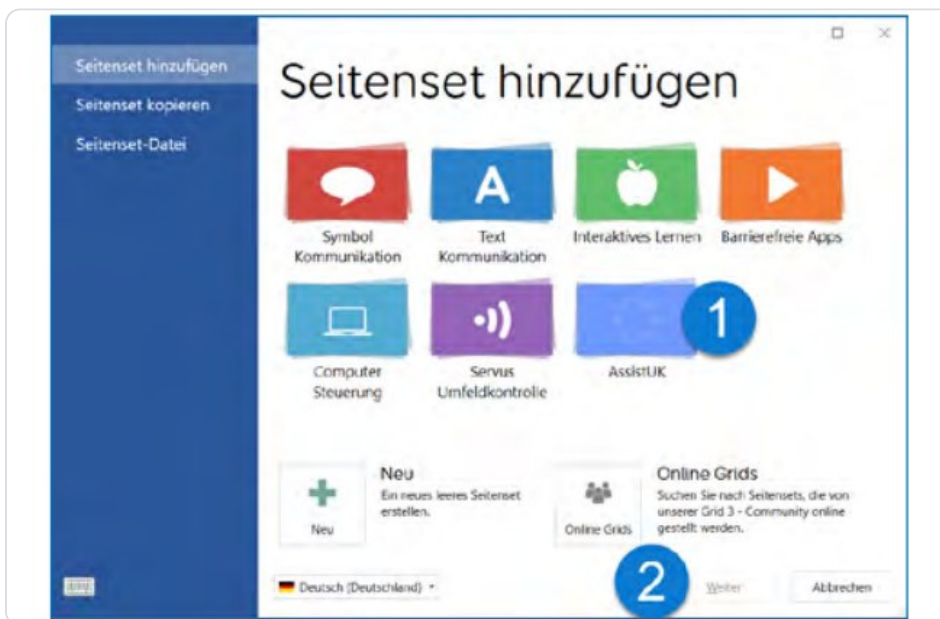

Das Feld „AssistUK“ auswählen und mit „weiter“ bestätigen

- 3 In der Liste den Bereich **Agismus** wählen (1) und auf **weiter** (2) klicken.

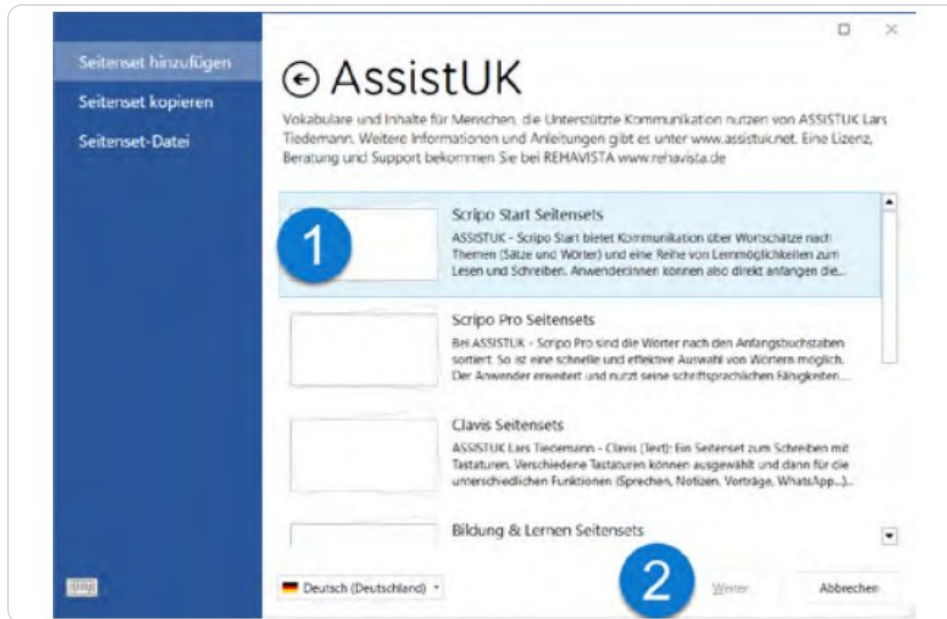


In der Liste den gewünschten Bereich wählen – die Abbildungen zeigen als Beispiel Scripo Start

- 4 Das gewünschte Seitenset wählen (1) und auf **weiter** (2) klicken.



Das gewünschte Seitenset auswählen (Beispiel Scripo Start)

- 5 Unten auf **Hinzufügen** (1) klicken.

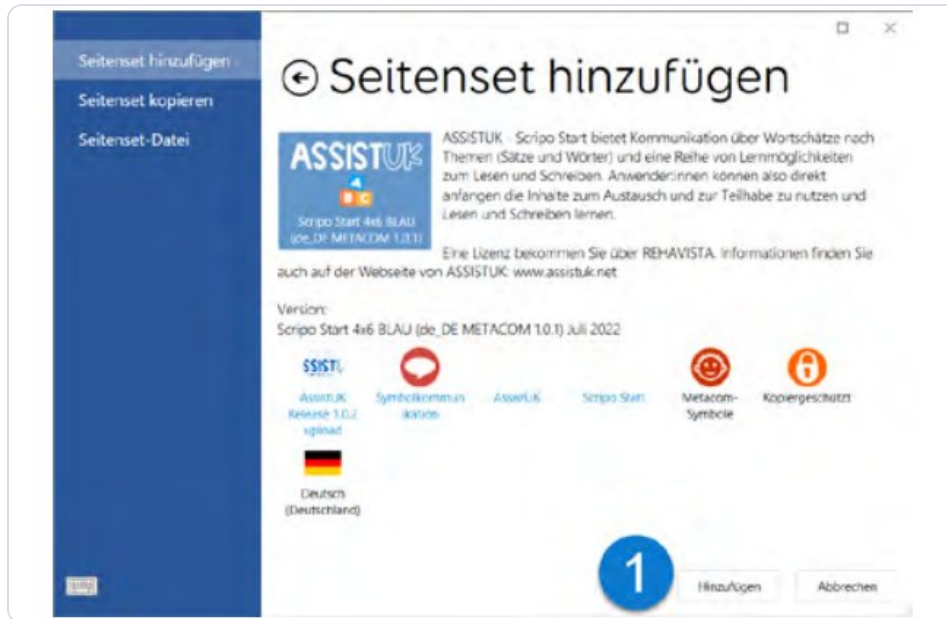

Mit „Hinzufügen“ wird das Seitenset geladen (Beispiel Scripo Start)


Das Seitenset wird geladen und zu „Meine Seitensets“ hinzugefügt. Es kann direkt geöffnet werden. Außerdem können weitere Seitensets geladen werden.

Wenn das Feld „AssistUK“ nicht erscheint. Prüfen Sie die Internetverbindung und die eingestellte Sprache Deutsch (Deutschland) . Danach das Menü schließen und neu öffnen – die Liste wird neu geladen.

Grid for iPad


Auch auf dem iPad laden Sie die Inhalte von AssistUK bei bestehender Internetverbindung direkt in der App.

- 1 Das iPad mit dem Internet verbinden. Auf **Meine Seiten** gehen, oben das Menü öffnen und **Seitensets hinzufügen** wählen.

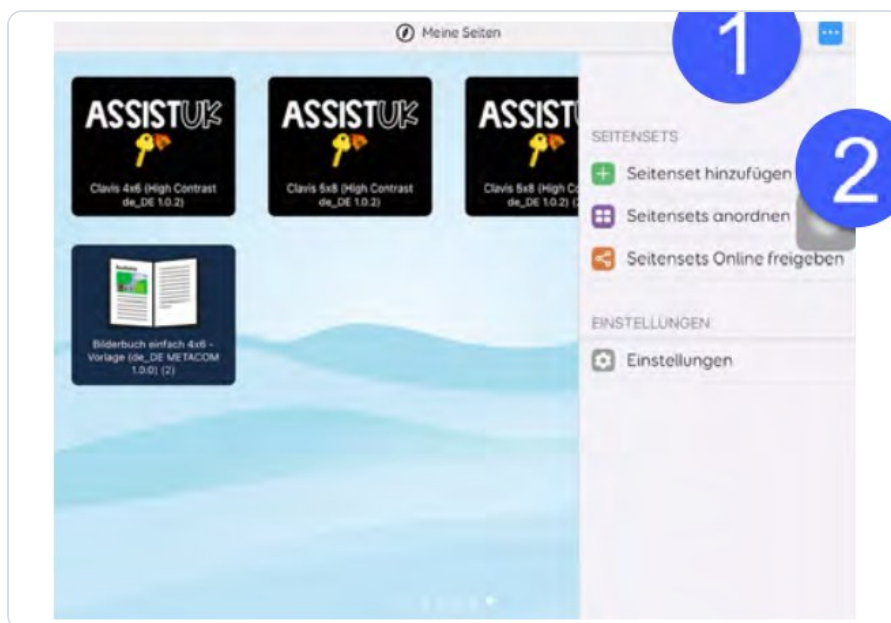


Über das Menü auf „Meine Seiten“: „Seitensets hinzufügen“

- 2 Einen Moment warten. Bei eingestellter Sprache **Deutsch (Deutschland)** erscheint das Feld **AssistUK**. Das Feld auswählen und auf **weiter** klicken.

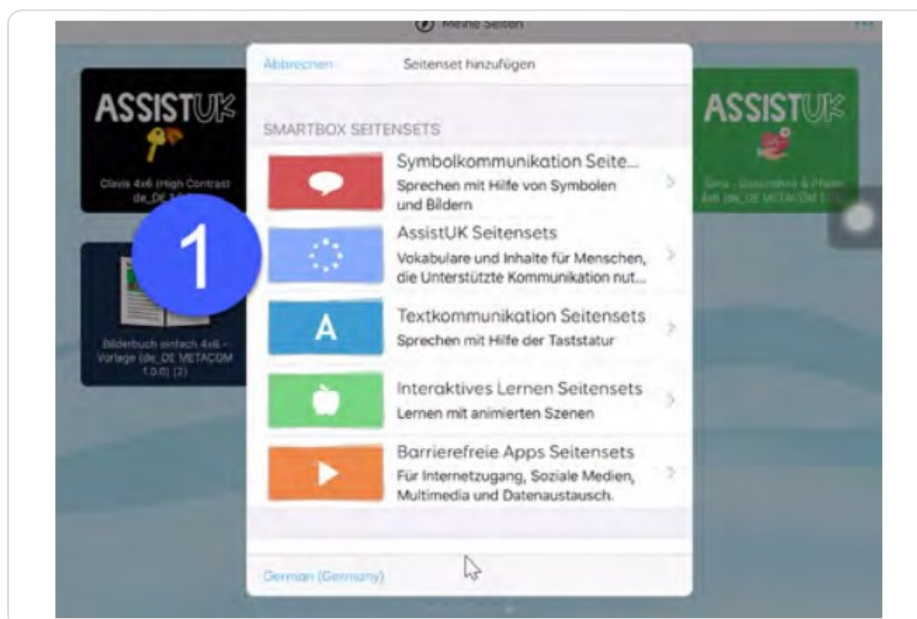


Das Feld „AssistUK“ auswählen

- 3 In der Liste den Bereich **Agismus** wählen und anklicken.

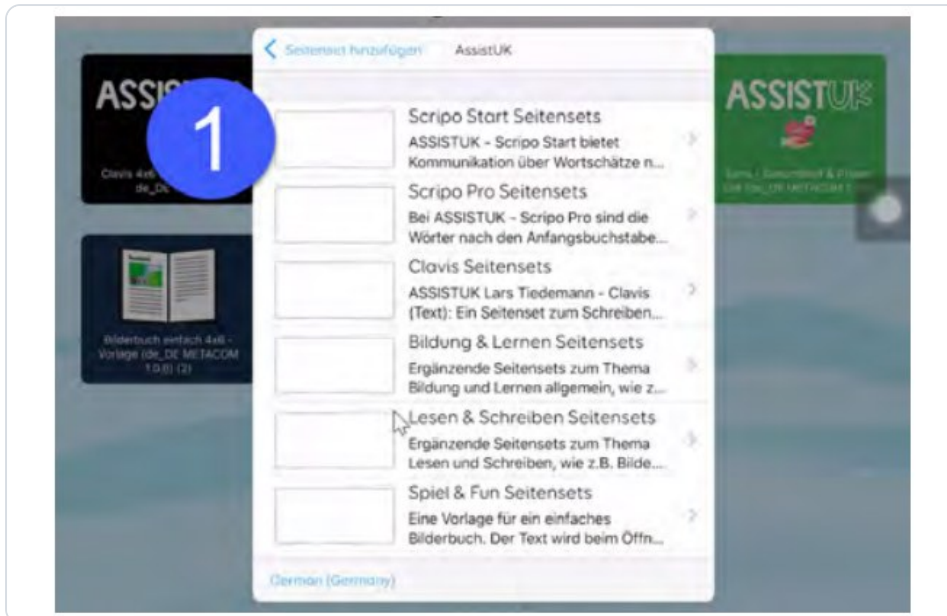


Den gewünschten Bereich anklicken – die Abbildungen zeigen als Beispiel Scripo Start

- 4 Das gewünschte Seitenset wählen.

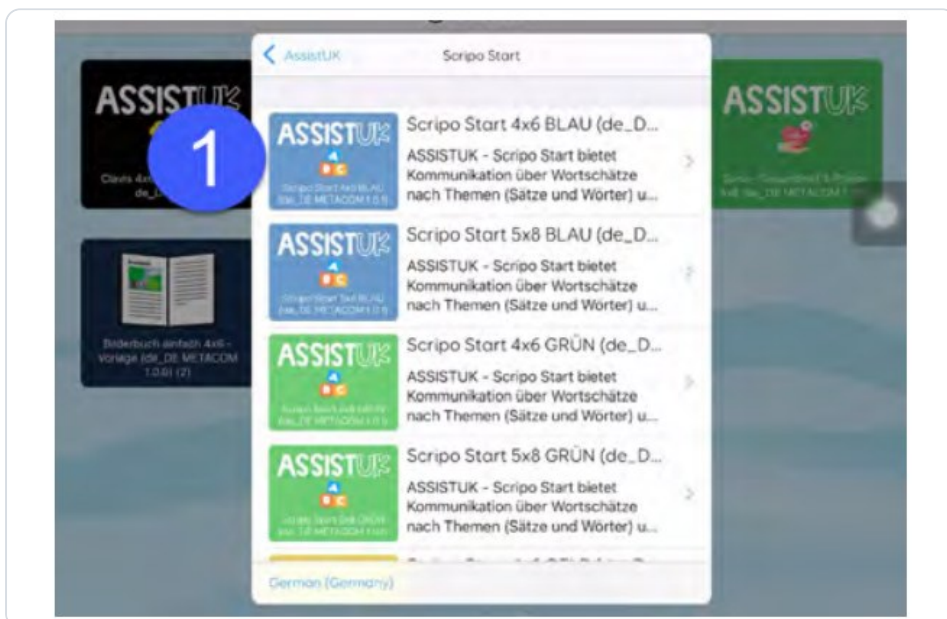

Das gewünschte Seitenset wählen (Beispiel Scripo Start)

- 5 Auf „Hinzufügen“ (1) klicken.

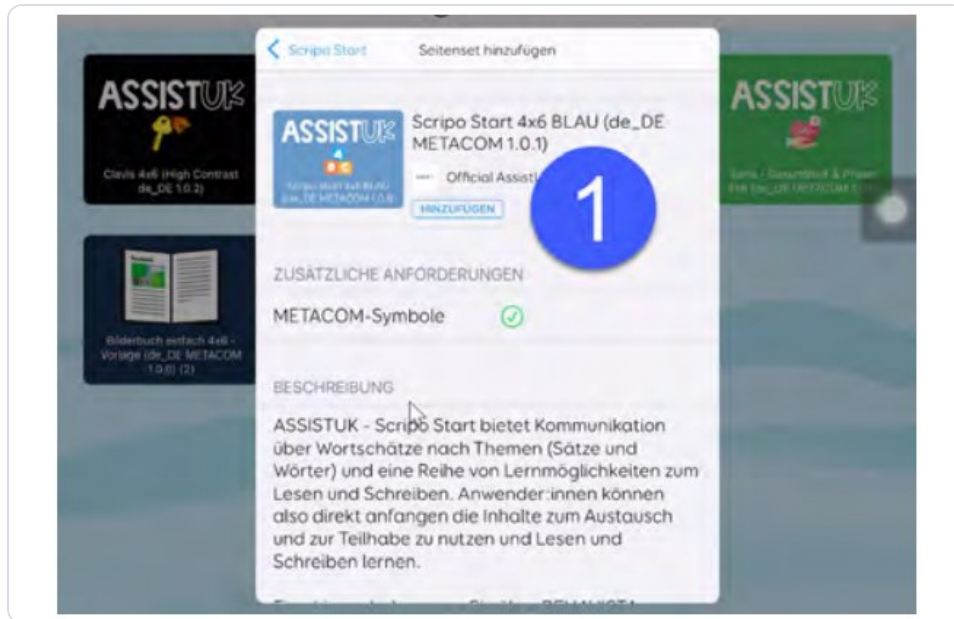

Mit „Hinzufügen“ wird das Seitenset geladen (Beispiel Scripo Start)


Das Seitenset wird geladen und zu „Meine Seitensets“ hinzugefügt. Es kann direkt geöffnet werden. Es können weitere Seitensets geladen werden.

Wenn das Feld „AssistUK“ nicht erscheint. Prüfen Sie die Internetverbindung und die eingestellte Sprache Deutsch (Deutschland) . Danach die App schließen und neu öffnen – die Liste wird neu geladen.

AUFBAU: DIE SPIELBEREICHE

Agismus enthält Seitensets für unterschiedliche Arten des gemeinsamen Spielens:

- **Geräusche** – gemeinsam Geräusche machen: pupsen, niesen, rülpfen, husten, lachen, schmatzen. Ein Feld drücken, das Geräusch kommt.
- **Grimassen** – Gesichter machen und einander nachahmen: lachen, weinen, gelangweilt gucken, schielen, erschrocken oder wütend gucken, Zunge raus.
- **Gemeinsam singen** – Mitmachseiten für Lieder: Texte und Aktionen mit Symbolen unterstützt.
- **Würfel- und Brettspiele** – fertige Seiten für Klassiker wie Mensch-ärgere-dich-nicht, mit Symbolen für Spielzug, Würfeln, Jubeln und Protestieren.
- **Rollenspiele und kreative Aktivitäten** – Symbolseiten für freies Spielen, Kochen, Basteln und andere gemeinsame Aktivitäten.
- **Kommunikation über das Spiel** – Reaktionen wie „Dein Zug“, „Ich habe gewonnen“, „Noch einmal“, „Das ist nicht fair“ sind direkt verfügbar.

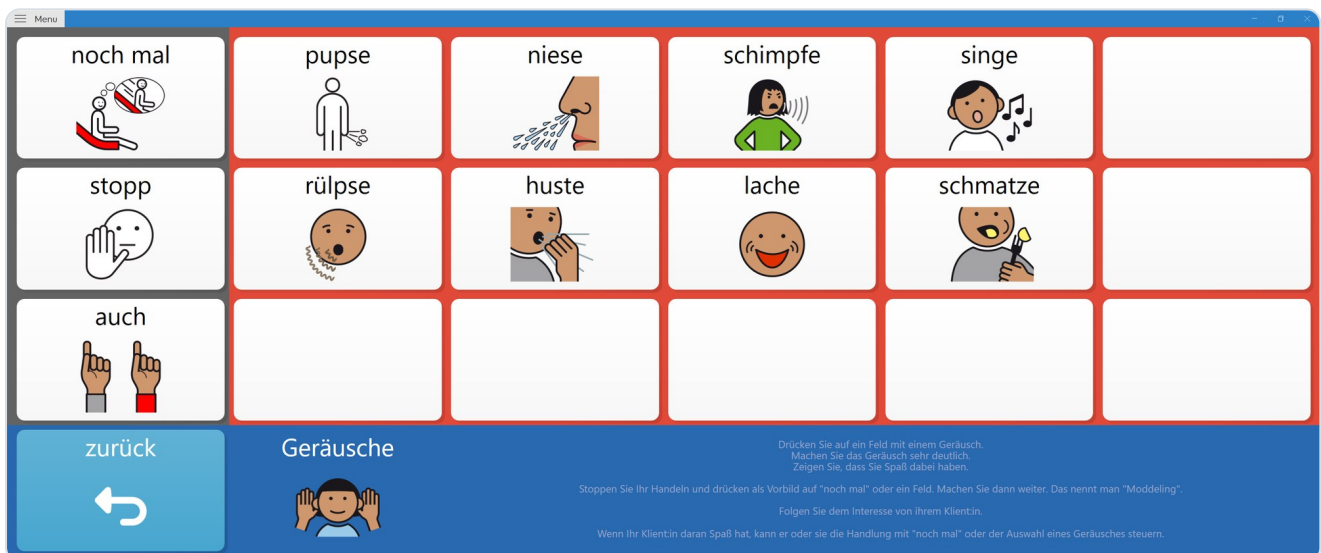


Die Seite „Geräusche“: links die Steuerfelder „noch mal“, „stopp“ und „auch“, unten die Spielhinweise für die Begleitung

Die Steuerfelder: noch mal, stopp, auch

Auf den Spielseiten stehen links die Felder, mit denen die spielende Person das Spiel lenkt: **noch mal** fordert die Wiederholung, **stopp** beendet den Durchgang, **auch** meldet „ich will das auch“. Genau darin liegt das Spiel: Die Person bestimmt Tempo und Verlauf – und erlebt, dass ihre Äußerung sofort etwas bewirkt.

Die Spielhinweise auf der Seite

Unten auf den Spielseiten stehen kurze Hinweise für die Begleitung: das Geräusch sehr deutlich machen, Spaß zeigen, das eigene Handeln stoppen und als Vorbild selbst auf **noch mal** oder ein Feld drücken (Modeling), dem Interesse der spielenden Person folgen. So kann jede Begleitperson sofort einsteigen – ohne Vorbereitung.

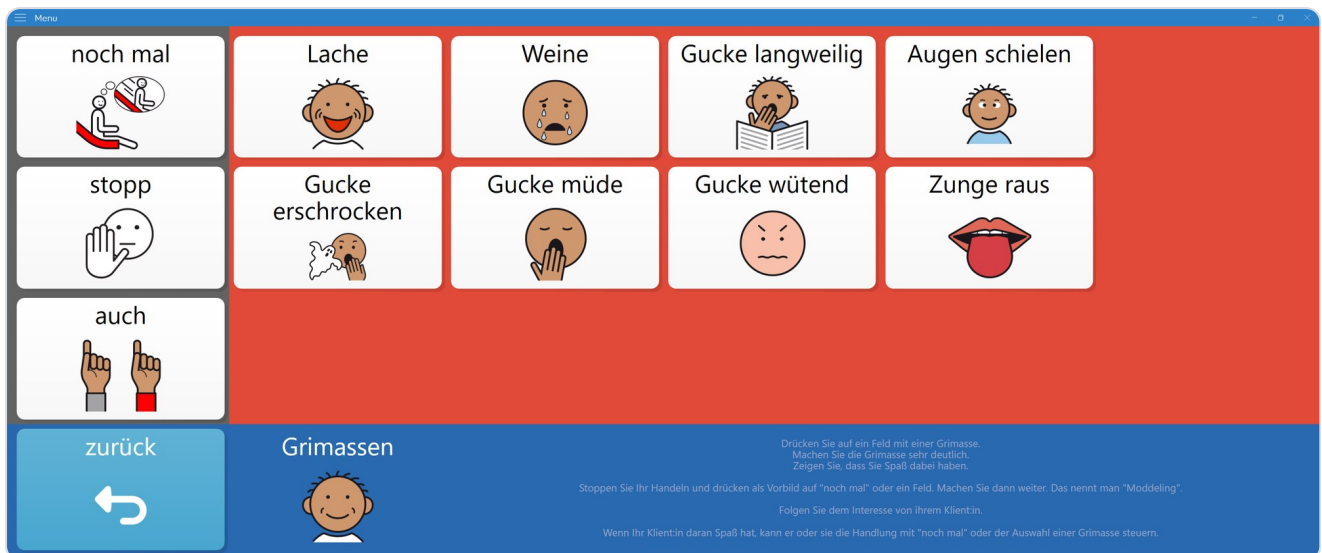

Die Seite „Grimassen“: Gesichter machen und einander nachahmen

SO GELINGT DAS SPIEL

Vier Dinge machen ein Agismus-Spiel tragfähig:

- 1 **Vorhersagbarkeit.** Dasselbe Spiel, derselbe Ablauf – wer weiß, was kommt, kann mitsteuern.
- 2 **Rollenwechsel.** Mal bin ich dran, mal du. Abwechseln ist die Grundform des Gesprächs.
- 3 **Gemeinsame Aufmerksamkeit.** Andocken statt umlenken: dort einsteigen, wo die Aufmerksamkeit der Person gerade ist.
- 4 **Wirksamkeit.** Jede Auswahl bewirkt sofort etwas – das Geräusch kommt, das Gesicht wird gezogen, es geht weiter.

Und die wichtigste Regel: **die Pause.** Mitten im Spiel innehalten und abwarten – dieser Moment lockt die nächste Äußerung hervor. Jede Antwort gilt: ein Blick, ein Laut, eine Bewegung, ein Feld.

Vertiefung. Der geführte Kurs „Mit Agismus spielen“ geht in acht Einheiten durch die Spielpraxis – mit Übungen am eigenen Gerät. Kostenlos, ohne Anmeldung (QR-Code am Ende dieses Handbuchs).

ANPASSEN

Die mitgelieferten Spiele sind der Anfang – eigene Spiele machen Agismus persönlich. Sie können vorhandene Spiele als Vorlage verwenden, Spiele zu Lieblingsthemen gestalten, den Schwierigkeitsgrad anpassen und eigene Fotos einbinden: vertraute Personen und echte Momente motivieren am meisten.

Grid 3 (Windows)

Felder ausblenden und einblenden

In Grid können Sie Felder ein- und ausblenden. So lässt sich eine Seite vereinfachen, ohne etwas zu löschen – das Einblenden ist später wieder möglich.

- 1 Die Seite öffnen, auf der ein Feld ausgeblendet werden soll. Oben das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.



Das Menü öffnen und „Seite bearbeiten“ wählen

- 2 Das Feld auswählen. Oben im Menü unter **Zugänglichkeit des Feldes** die Option **Versteckt** wählen. An dieser Stelle können weitere Felder ausgeblendet werden.



Unter „Zugänglichkeit des Feldes“ die Option „Versteckt“ wählen

- 3 **Bearbeiten beenden** wählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Zum Einblenden gehen Sie denselben Weg und wählen unter **Zugänglichkeit des Feldes** wieder **Voll zugänglich**.

Ein einfaches Feld ändern

Auf einem einfachen Feld sind die Bezeichnung (der Text) und das Bild (Symbol oder Foto) fest gespeichert. So ändern Sie beides:

- 1 Die Seite öffnen, oben das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.

- 2 Das Feld auswählen (1), Beschriftung ändern (2) wählen und den Text über die Tastatur eingeben.



Feld auswählen und „Beschriftung ändern“ wählen

- 3 Passende Bilder werden oben vorgeschlagen (2) und können direkt gewählt werden. Weitere Symbole oder eigene Fotos gibt es über Bild finden (3).



Vorgeschlagenes Bild wählen oder über „Bild finden“ suchen

- 4 Bearbeiten beenden wählen und das Speichern mit Ja bestätigen.


Tipp. Eigene Fotos machen viele Seiten erst richtig persönlich – vertraute Personen, Orte und Gegenstände werden schneller erkannt als jedes Symbol.

Grid for iPad

Felder ausblenden und einblenden


Auch in Grid for iPad lassen sich Felder ein- und ausblenden, um eine Seite zu vereinfachen.

- 1 Die Seite öffnen. Das Menü öffnen (1) und **Seite bearbeiten** (2) wählen.

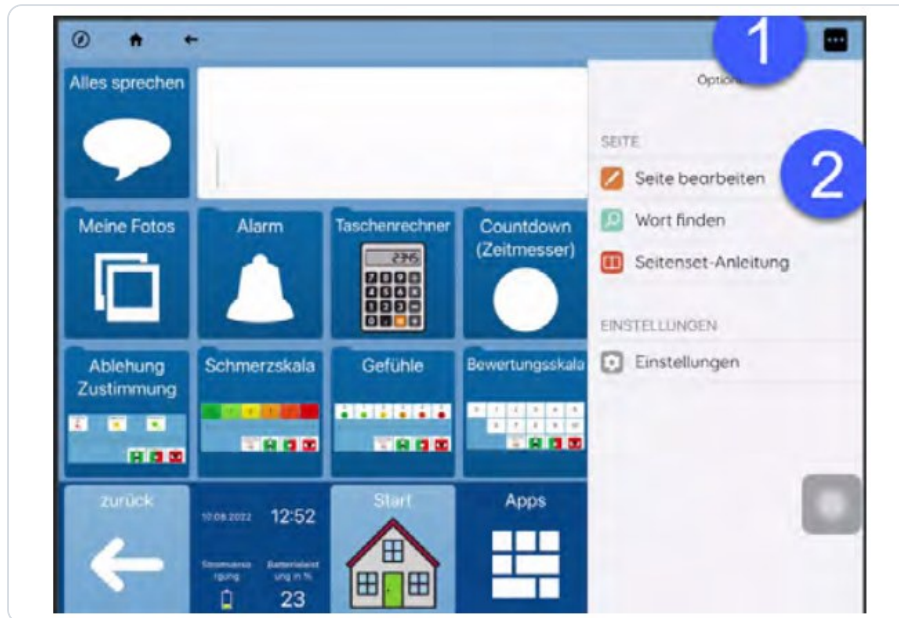


Das Menü öffnen und „Seite bearbeiten“ wählen

- 2 Das Feld auswählen (1) und **Feld bearbeiten** (2) wählen.

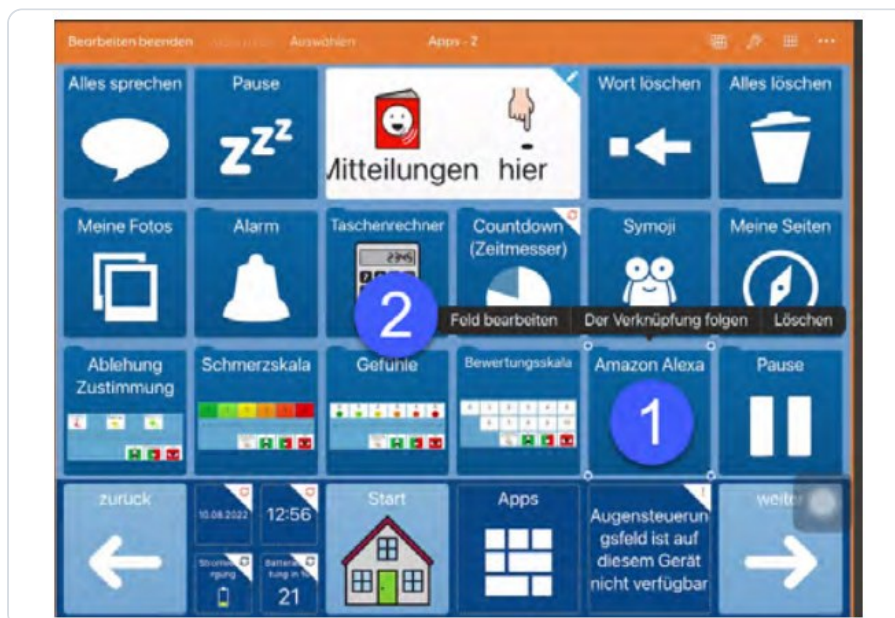


Das Feld auswählen und „Feld bearbeiten“ wählen

- 3 Das Feld wird vergrößert dargestellt. Rechts oben (neben **Befehle**) auf **Eigenschaften** (1) klicken.

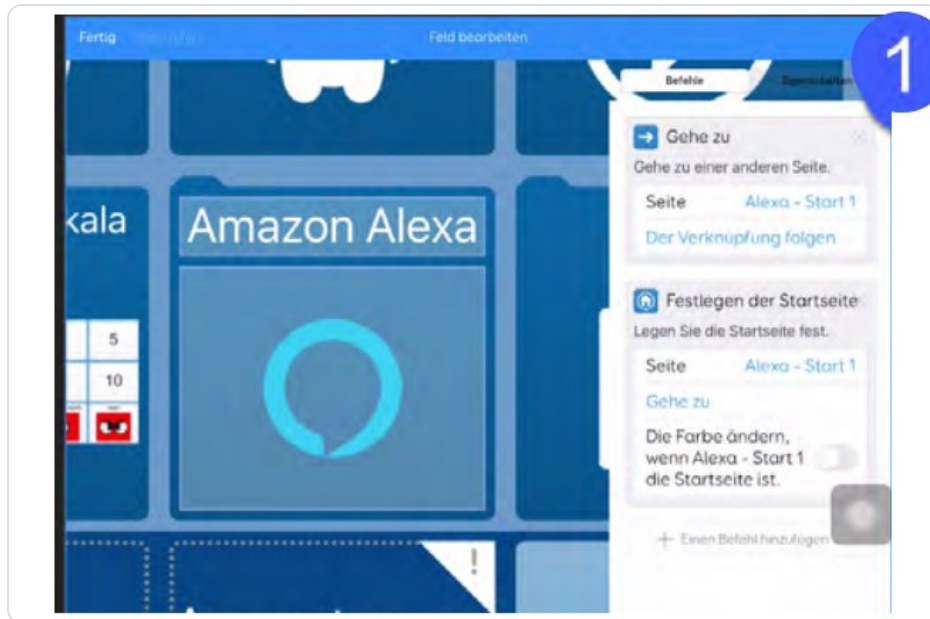

Rechts oben auf „Eigenschaften“ klicken

- 4 Nach unten scrollen, den Eintrag **Zugänglichkeit des Feldes** wählen und in der Liste **Versteckt** (1) wählen.

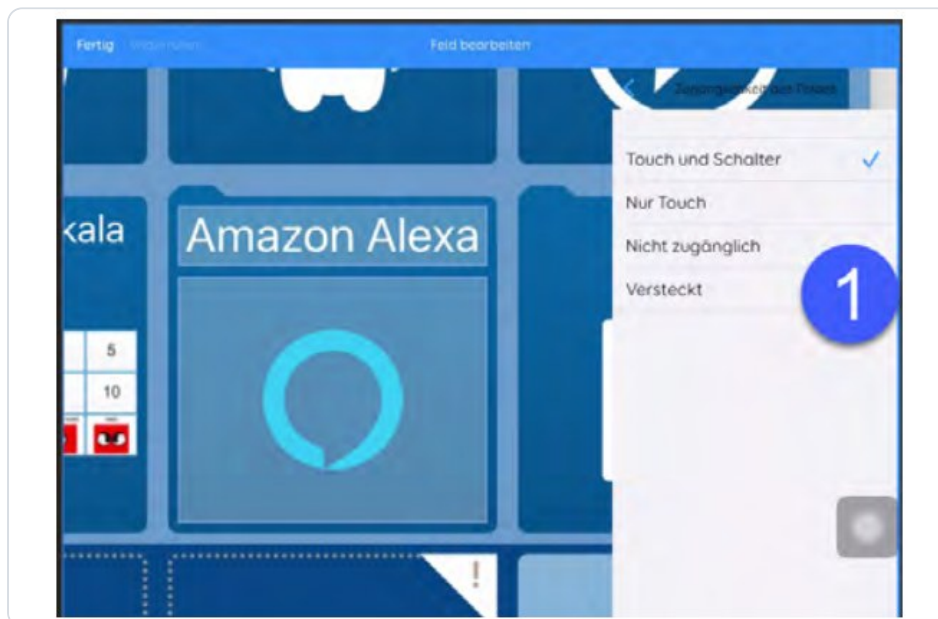

In der Liste „Versteckt“ wählen


- 5 Oben auf **Fertig** klicken, danach **Bearbeiten beenden** wählen.

Zum Einblenden gehen Sie denselben Weg und wählen unter **Zugänglichkeit des Feldes** wieder **Touch und Schalter** .

Ein einfaches Feld ändern

- 1 Die Seite öffnen, das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.
- 2 Das Feld auswählen und **Feld bearbeiten** wählen. Das Feld wird vergrößert dargestellt.

- 3 Die Zeile mit der Bezeichnung auswählen und den Text über die Tastatur eingeben (1).

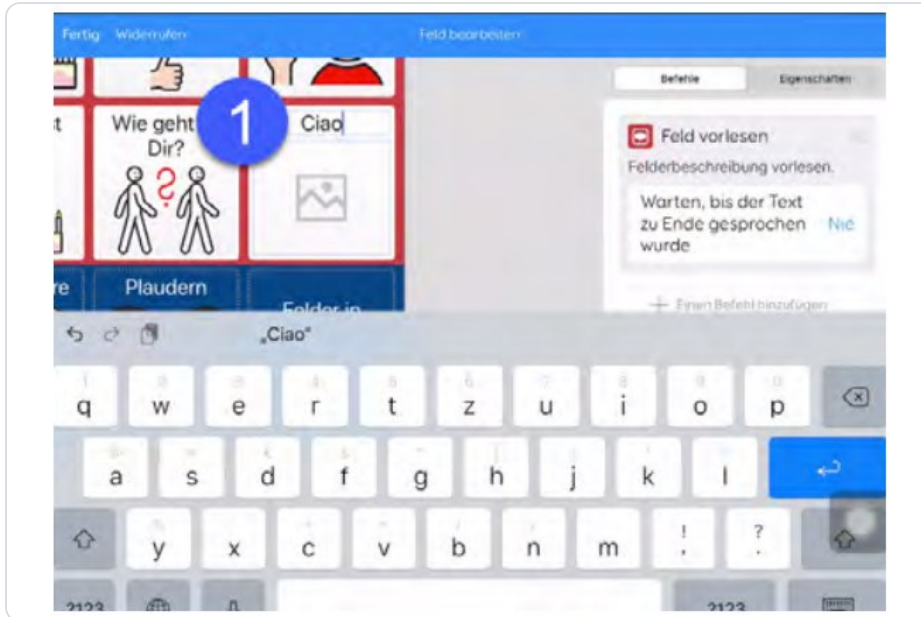

Die Bezeichnung über die Tastatur eingeben

- 4 In das Feld für die Bilder drücken und ein Bild auswählen (1). Unter **Bild finden** gibt es weitere Symbole, Fotos, Bilder aus dem Internet oder Aufnahmen mit der Kamera. Auf **Fertig** (2) drücken.



Ein Bild wählen und mit „Fertig“ bestätigen

- 5 **Bearbeiten beenden** wählen.

Tipp. Eigene Fotos machen viele Seiten erst richtig persönlich – vertraute Personen, Orte und Gegenstände werden schneller erkannt als jedes Symbol.

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Beobachtung	Mögliche Ursache	Was hilft
Das Feld „AssistUK“ erscheint beim Laden nicht	Keine Internetverbindung oder andere Sprache eingestellt	Verbindung prüfen, Sprache Deutsch (Deutschland) einstellen, Menü neu öffnen
Es kommt kein Spiel zustande	Zu viel Aufforderung, zu wenig Pause	Selbst vormachen, Spaß zeigen, dann warten – die Pause aushalten
Die Person schaut weg	Das Thema trägt gerade nicht	Dem Interesse folgen und dort andocken – nicht umlenken
Ein Feld spricht nicht	Lautstärke, oder das Feld ist ohne Inhalt	Gerätelautstärke prüfen; im Bearbeiten-Modus nachsehen
Änderungen sind wieder verschwunden	Bearbeiten wurde ohne Speichern beendet	Nach dem Ändern Bearbeiten beenden wählen und mit Ja bestätigen

HILFE UND KONTAKT

Bedienfragen beantworten wir kostenlos: **lars.tiedemann@assistuk.net**

Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Bildern gibt es im Hilfe-Bereich der Website. Fragen zur Versorgung, zu Konditionen und zum Bezug beantworten REHAVISTA und deren Partnerfirmen direkt.

MEHR ERFAHREN

Mit dem Handy die QR-Codes scannen – oder die Adressen direkt eingeben. Alle Angebote sind kostenlos.



Hilfe & Anleitungen

Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Störungshilfe
und alle Handbücher –
kostenlos.

assistuk.net/hilfe



Guter Gesprächspartner

Wie Gespräche gelingen:
warten können, echte
Fragen stellen, Zeit lassen.

assistuk.net/info/guter-gespraechs-partner



Agismus im Netz

Die Produktseite:
Neuigkeiten, häufige
Fragen, alle Anleitungen.

assistuk.net/smartbox-grid/agismus



Kurs: Mit Agismus spielen

Acht Einheiten zur
Spielpraxis – kostenlos,
ohne Anmeldung, mit
Teilnahmebestätigung.

assistuk.net/hilfe/kurs/agismus