

AssistUK Easy

Einfache Symboltafeln – wenige, große Felder für den direkten Einstieg.

Anleitung für Grid 3 (Windows) und Grid for iPad (iPadOS) · Fassung 1 · Stand August 2026



INHALT

Was Easy ist	3
Für wen Easy passt	3
Die Fassungen von Easy	3
Was Sie brauchen	4
Easy laden	5
Grid 3 (Windows)	5
Grid for iPad	7
Aufbau: So ist Easy gegliedert	11
Die Themen	11
Anpassen	13
Grid 3 (Windows)	13
Grid for iPad	16
Wenn etwas nicht funktioniert	19
Hilfe und Kontakt	20
Mehr erfahren	21

WAS EASY IST

AssistUK Easy ist ein Vokabular für Menschen, die Unterstützte Kommunikation (UK) nutzen wollen und eine einfache, klar strukturierte Oberfläche brauchen. Easy bietet grundlegende Kommunikation für Alltagssituationen – übersichtlich, verständlich und sofort einsetzbar. Der Wortschatz ist bewusst reduziert, damit der Einstieg leicht gelingt: wenige Kategorien, große Felder, immer derselbe Aufbau.

Die Felder sprechen direkt. Wer ein Feld auswählt, sagt etwas – ohne Umwege über Menüs oder verschachtelte Seiten. In der größten Rastergröße kommt ein Mitteilungsfenster dazu, in dem Aussagen aus mehreren Feldern gesammelt und dann gesprochen werden.

Kurz gesagt. Easy ist der einfache Einstieg: wenige, große Felder, die sofort sprechen.

Für wen Easy passt

Easy richtet sich an Menschen,

- die nach einem Schlaganfall grundlegende Kommunikationsbedürfnisse haben und eine klare, überschaubare Oberfläche brauchen,
- die von einer reduzierten, gut strukturierten Auswahl profitieren,
- für die eine einfache Navigation und wenige Kategorien wichtig sind,
- die zum ersten Mal eine Kommunikationshilfe nutzen und einen niedrigschwelligen Einstieg brauchen.

Easy richtet sich an ein Umfeld, das eine schnelle, verlässliche Verständigung im Alltag ermöglichen möchte – und das Vokabular mit eigenen Wörtern und Fotos an die Person anpassen will.

Sprache. Easy gibt es nur auf Deutsch. Die Symbole sind international verständlich, die Wörter und ihre Anordnung folgen aber dem Deutschen.

Die Fassungen von Easy

- **Easy mit Mitteilungsfenster:** Wörter werden in einem Mitteilungsfenster gesammelt, sodass eigene Sätze entstehen.
- **Easy ohne Mitteilungsfenster:** Die noch einfachere Fassung – jedes Feld spricht sofort, nichts wird gesammelt.
- **Easy Lite:** Weniger vorbelegte Felder, viel Freiraum. Sinnvoll, wenn das Umfeld Zeit hat, das Vokabular sehr individuell zu füllen.

Was Sie brauchen


Software	Grid 3 (Windows) oder Grid for iPad
Lizenz	AssistUK-Lizenz
Symbole	METACOM (Annette Kitzinger)
Bezug	über REHAVISTA und deren Partnerfirmen

EASY LADEN

Grid 3 (Windows)

Die Inhalte von AssistUK werden weiterentwickelt, ergänzt und online zur Verfügung gestellt. Bei bestehender Internetverbindung laden Sie Easy direkt in der Software.

- 1 Das Gerät mit dem Internet verbinden. Auf **Meine Seiten** gehen (1), oben das Menü öffnen (2) und **Seitensets hinzufügen** (3) wählen.

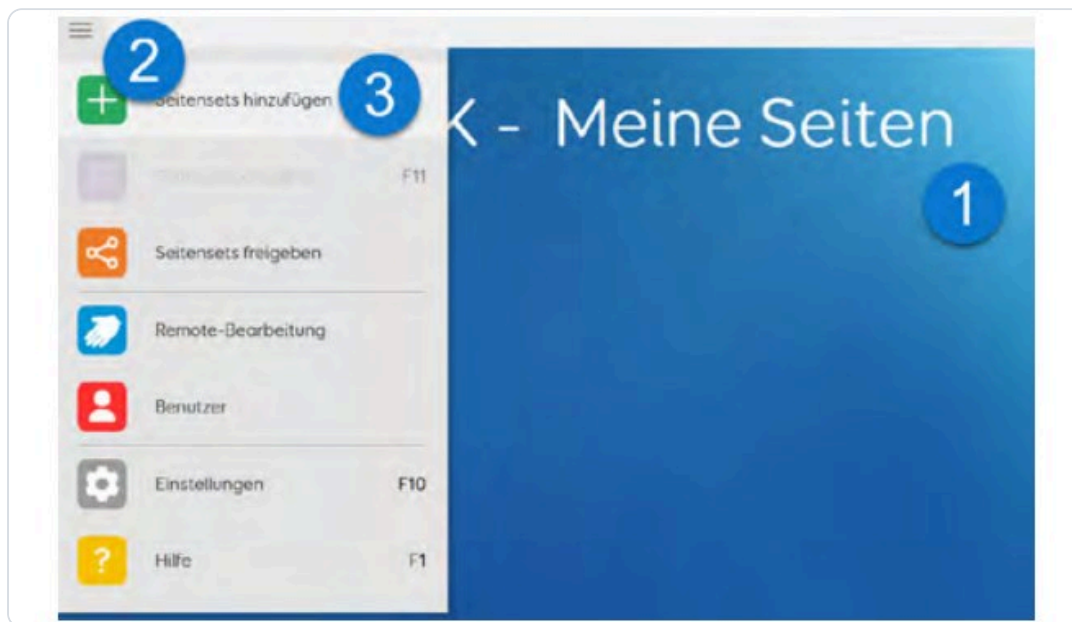


Über das Menü auf „Meine Seiten“: „Seitensets hinzufügen“

- 2 Einen Moment warten. Bei bestehender Internetverbindung und eingestellter Sprache **Deutsch** (Deutschland) erscheint das Feld **AssistUK** (1). Das Feld auswählen und auf **weiter** (2) klicken.



Das Feld „AssistUK“ auswählen und mit „weiter“ bestätigen

- 3 In der Liste den Bereich **Easy** wählen (1) und auf **weiter** (2) klicken.

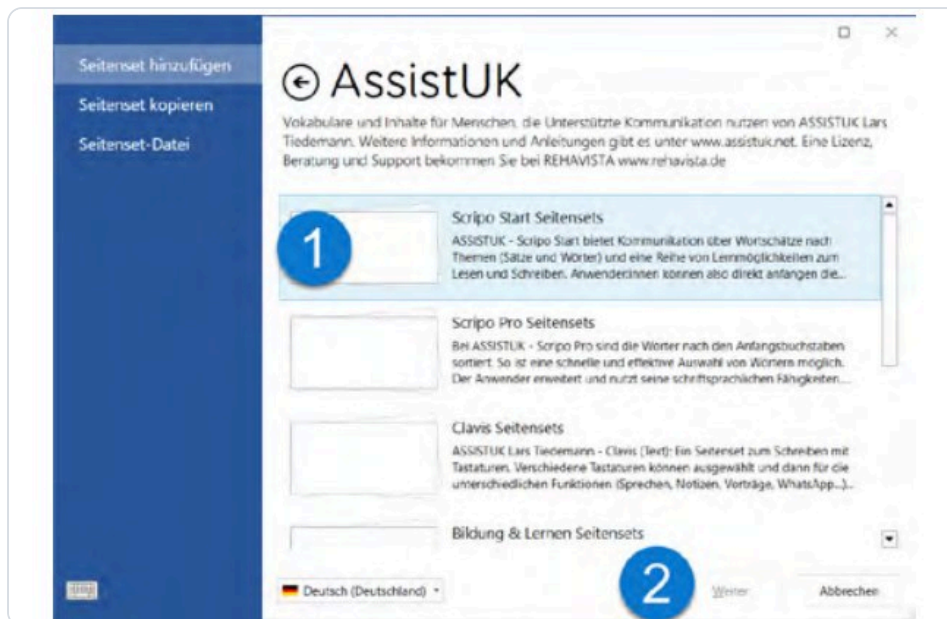


In der Liste den gewünschten Bereich wählen – die Abbildungen zeigen als Beispiel Scripo Start

- 4 Das gewünschte Seitenset wählen (1) und auf **weiter** (2) klicken.



Das gewünschte Seitenset auswählen (Beispiel Scripo Start)

- 5 Unten auf **Hinzufügen** (1) klicken.

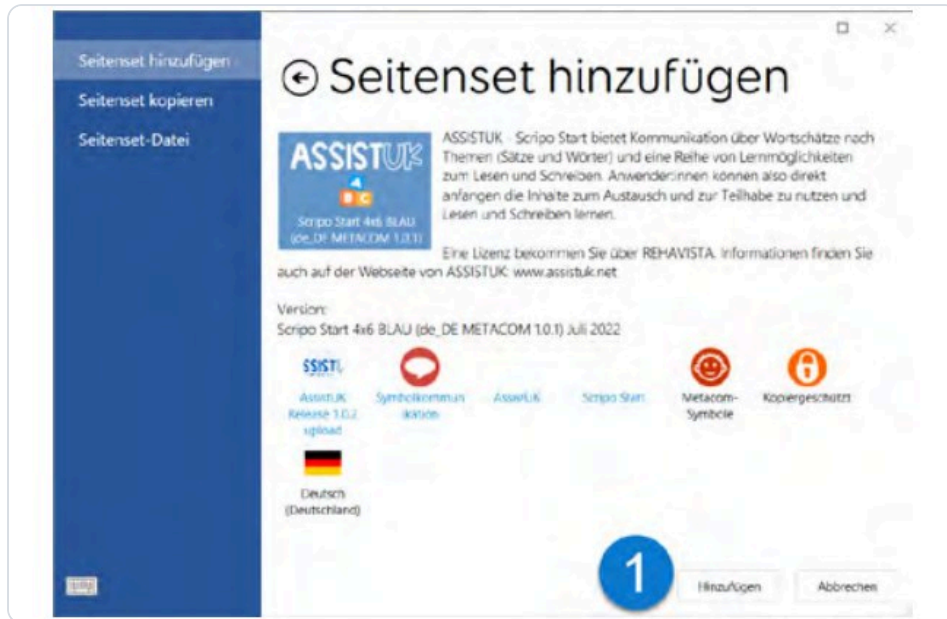

Mit „Hinzufügen“ wird das Seitenset geladen (Beispiel Scripo Start)


Das Seitenset wird geladen und zu „Meine Seitensets“ hinzugefügt. Es kann direkt geöffnet werden. Außerdem können weitere Seitensets geladen werden.

Wenn das Feld „AssistUK“ nicht erscheint. Prüfen Sie die Internetverbindung und die eingestellte Sprache Deutsch (Deutschland) . Danach das Menü schließen und neu öffnen – die Liste wird neu geladen.

Grid for iPad


Auch auf dem iPad laden Sie die Inhalte von AssistUK bei bestehender Internetverbindung direkt in der App.

- 1 Das iPad mit dem Internet verbinden. Auf **Meine Seiten** gehen, oben das Menü öffnen und **Seitensets hinzufügen** wählen.

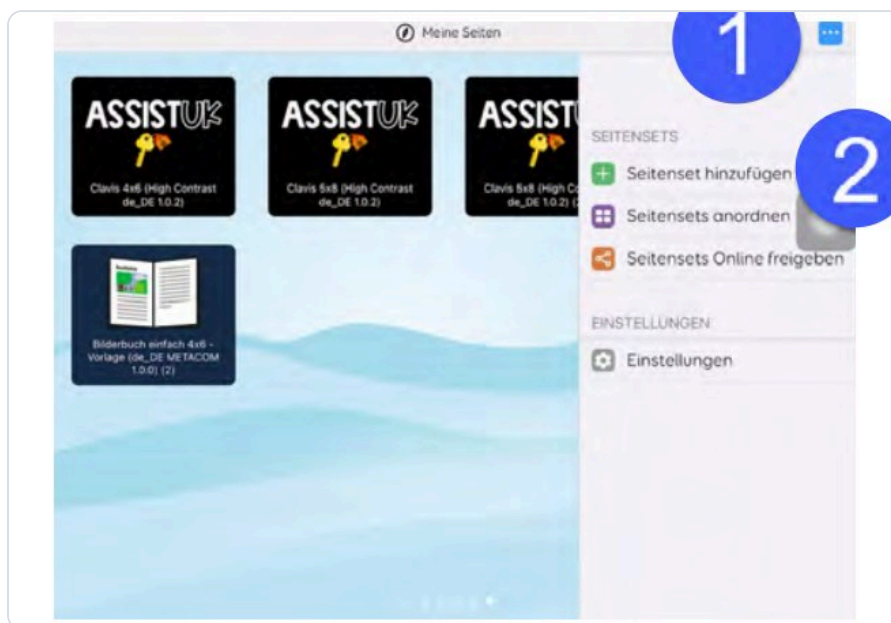


Über das Menü auf „Meine Seiten“: „Seitensets hinzufügen“

- 2 Einen Moment warten. Bei eingestellter Sprache **Deutsch (Deutschland)** erscheint das Feld **AssistUK**. Das Feld auswählen und auf **weiter** klicken.

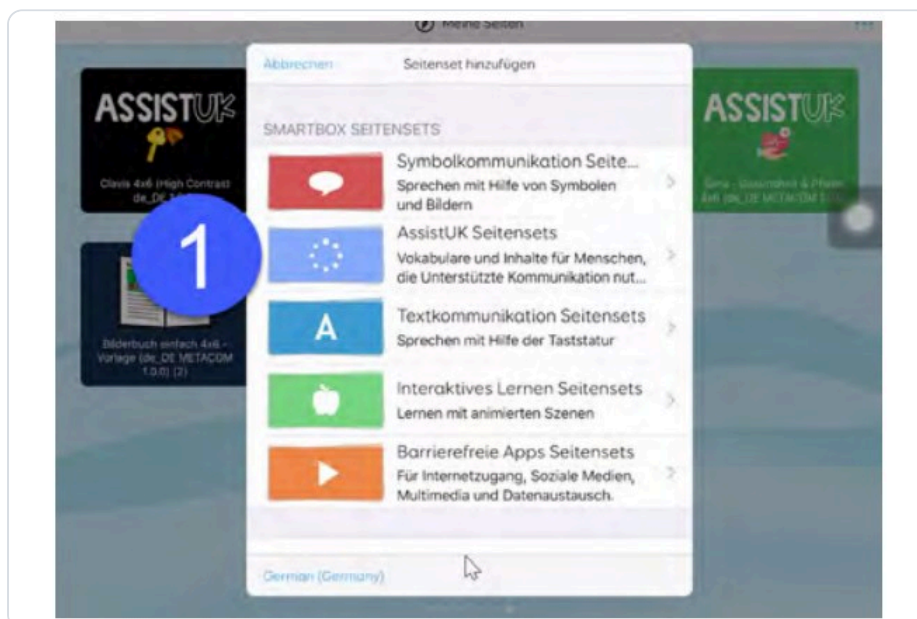


Das Feld „AssistUK“ auswählen

- 3 In der Liste den Bereich **Easy** wählen und anklicken.

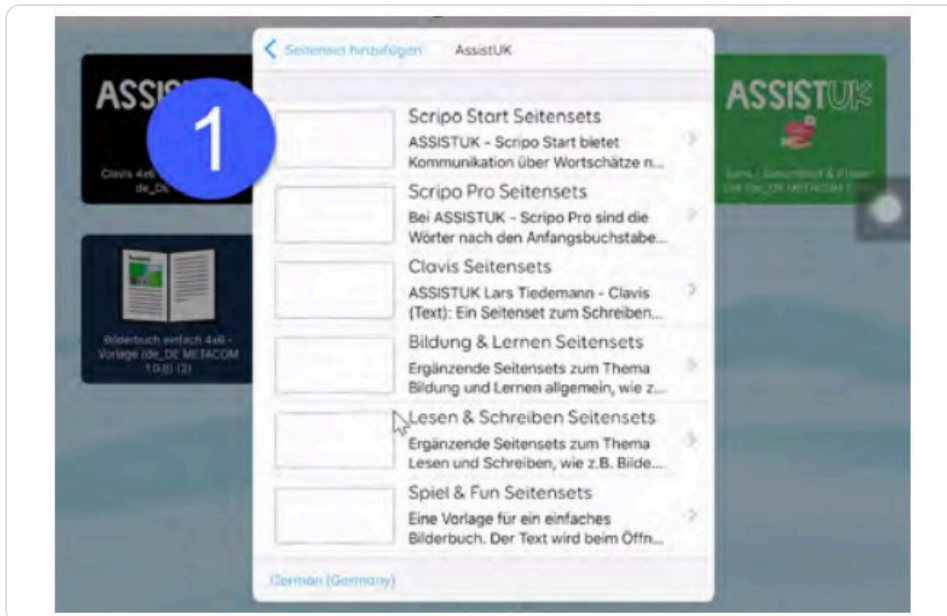


Den gewünschten Bereich anklicken – die Abbildungen zeigen als Beispiel Scripo Start

- 4 Das gewünschte Seitenset wählen.

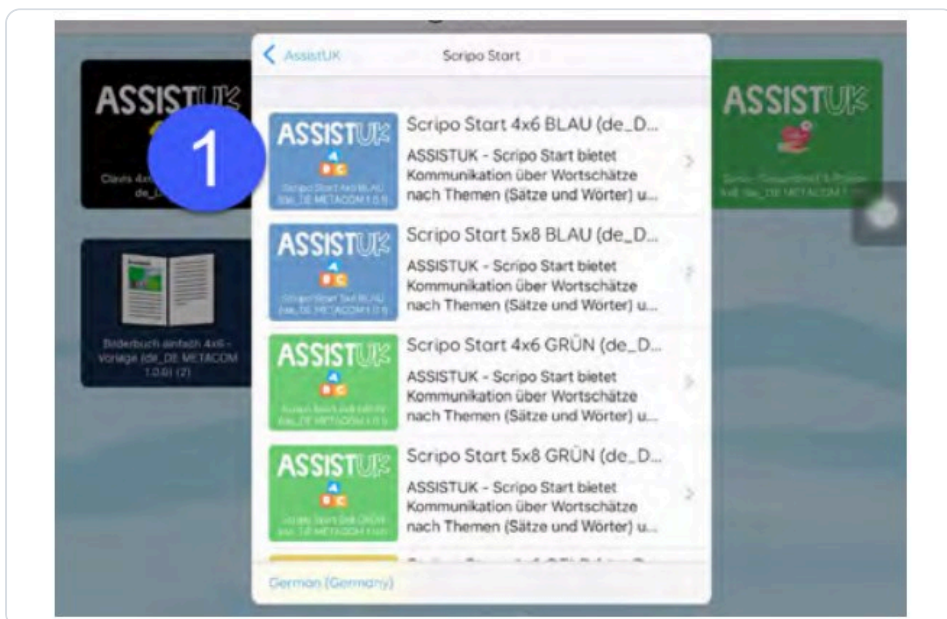

Das gewünschte Seitenset wählen (Beispiel Scripo Start)

- 5 Auf Hinzufügen (1) klicken.

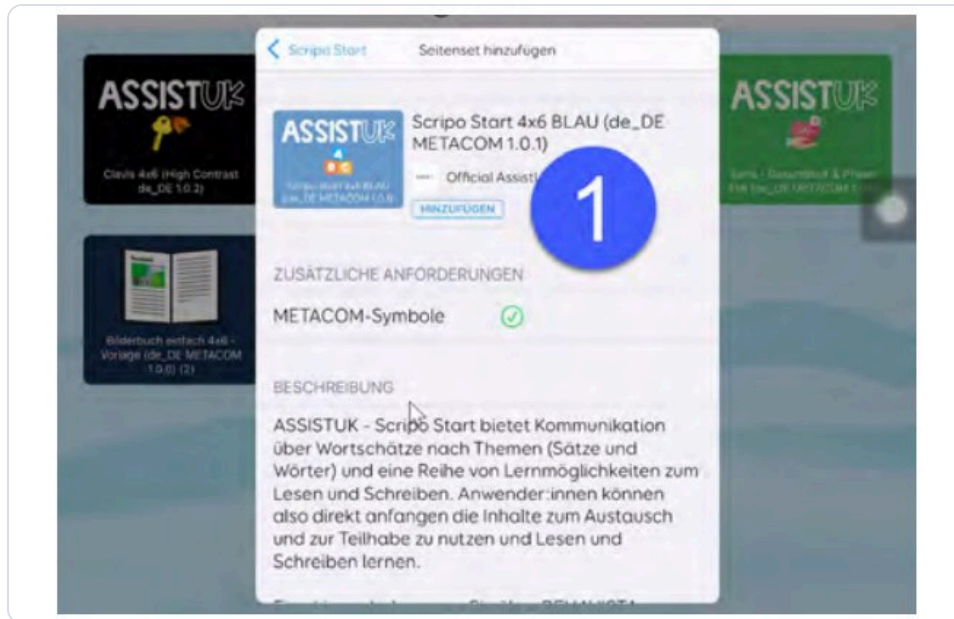

Mit „Hinzufügen“ wird das Seitenset geladen (Beispiel Scripo Start)

Das Seitenset wird geladen und zu „Meine Seitensets“ hinzugefügt. Es kann direkt geöffnet werden. Es können weitere Seitensets geladen werden.

Wenn das Feld „AssistUK“ nicht erscheint. Prüfen Sie die Internetverbindung und die eingestellte Sprache Deutsch (Deutschland) . Danach die App schließen und neu öffnen – die Liste wird neu geladen.

AUFBAU: SO IST EASY GEGLIEDERT

Easy wächst mit: Es beginnt mit 6 Feldern (Raster 2×3), führt über 15 Felder (3×5) zu 24 Feldern (4×6). Die Struktur bleibt dabei gleich – wer eine kleine Tafel kennt, findet sich auch auf der größeren zurecht. Im Raster 4×6 kommt das Mitteilungsfenster dazu: Dort werden Aussagen über einzelne Bilder gesammelt und dann ausgesprochen.

Die Navigation ist immer gleich: Das Feld für **zurück** ist immer unten links. Über **Start** geht es zur Startseite.


Die Themen

Easy bringt thematische Seiten für die wichtigsten Alltagssituationen mit:

- **Essen und Trinken** – Wünsche äußern, Lieblingsessen benennen, Hunger und Durst mitteilen.
- **Gefühle** – froh, traurig, müde, Schmerz, wütend. Besonders wichtig in Pflege und Rehabilitation.
- **Aktivitäten und Freizeit** – Fernsehen, Musik hören, nach draußen gehen, Besuch bekommen. Ermöglicht Mitbestimmung im Tagesablauf.
- **Familie und Personen** – Familienmitglieder und wichtige Bezugspersonen, anpassbar mit eigenen Fotos und Namen.
- **Begrüßungen und Alltag** – Hallo, Tschüss, Ja, Nein, Danke, Bitte. Sofort einsetzbar für erste Kommunikationserfolge.



Die Seite „Essen und Trinken“: oben das Mitteilungsfenster mit „Sprechen“, darunter die Themen

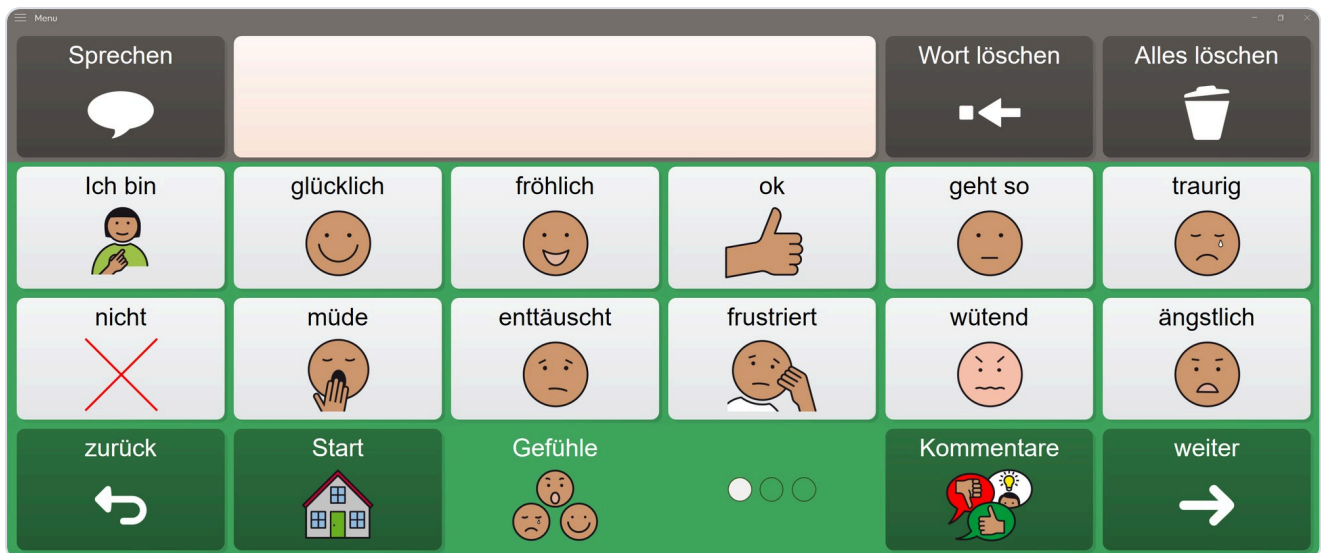

Die Seite „Gefühle“ – die Felder sprechen direkt

Welches Raster für wen? Beginnen Sie im Zweifel kleiner. Ein Raster, das sicher getroffen wird, ist mehr wert als eines mit vielen Feldern, das Mühe macht. Der Wechsel auf ein größeres Raster ist jederzeit möglich – die Struktur bleibt gleich.

ANPASSEN

Easy entfaltet seinen Wert, wenn es zur Person passt: die richtigen Namen, vertraute Fotos, die Lieblingsthemen. Beides geht direkt im Gerät.

Grid 3 (Windows)

Felder ausblenden und einblenden

In Grid können Sie Felder ein- und ausblenden. So lässt sich eine Seite vereinfachen, ohne etwas zu löschen – das Einblenden ist später wieder möglich.

- 1 Die Seite öffnen, auf der ein Feld ausgeblendet werden soll. Oben das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.



Das Menü öffnen und „Seite bearbeiten“ wählen

- 2 Das Feld auswählen. Oben im Menü unter **Zugänglichkeit des Feldes** die Option **Versteckt** wählen. An dieser Stelle können weitere Felder ausgeblendet werden.



Unter „Zugänglichkeit des Feldes“ die Option „Versteckt“ wählen

- 3 **Bearbeiten beenden** wählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Zum Einblenden gehen Sie denselben Weg und wählen unter **Zugänglichkeit des Feldes** wieder **Voll zugänglich**.

Ein einfaches Feld ändern

Auf einem einfachen Feld sind die Bezeichnung (der Text) und das Bild (Symbol oder Foto) fest gespeichert. So ändern Sie beides:

- 1 Die Seite öffnen, oben das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.

- 2 Das Feld auswählen (1), Beschriftung ändern (2) wählen und den Text über die Tastatur eingeben.



Feld auswählen und „Beschriftung ändern“ wählen

- 3 Passende Bilder werden oben vorgeschlagen (2) und können direkt gewählt werden. Weitere Symbole oder eigene Fotos gibt es über Bild finden (3).



Vorgeschlagenes Bild wählen oder über „Bild finden“ suchen

- 4 Bearbeiten beenden wählen und das Speichern mit Ja bestätigen.


Tipp. Eigene Fotos machen viele Seiten erst richtig persönlich – vertraute Personen, Orte und Gegenstände werden schneller erkannt als jedes Symbol.

Grid for iPad

Felder ausblenden und einblenden


Auch in Grid for iPad lassen sich Felder ein- und ausblenden, um eine Seite zu vereinfachen.

- 1 Die Seite öffnen. Das Menü öffnen (1) und **Seite bearbeiten** (2) wählen.

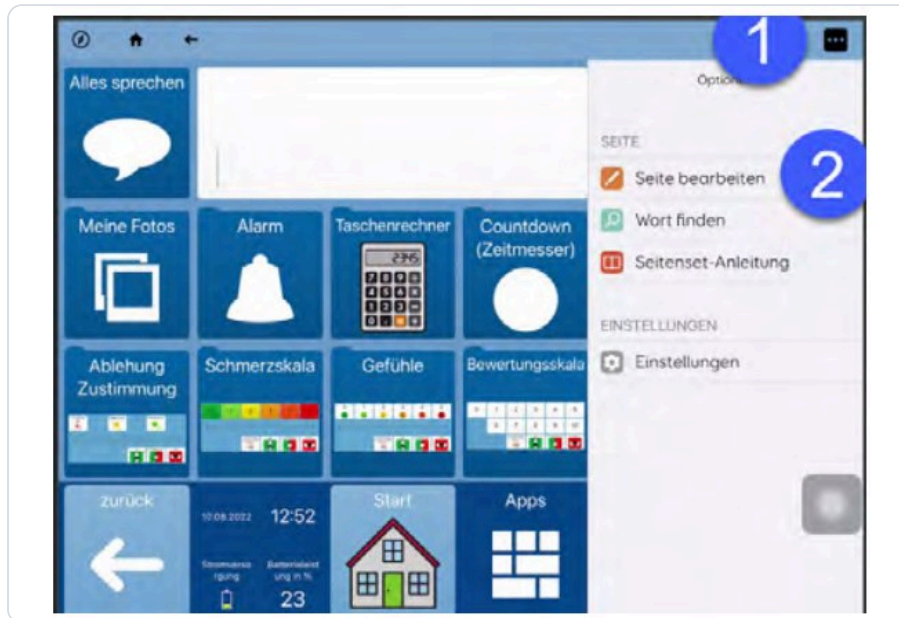


Das Menü öffnen und „Seite bearbeiten“ wählen

- 2 Das Feld auswählen (1) und **Feld bearbeiten** (2) wählen.

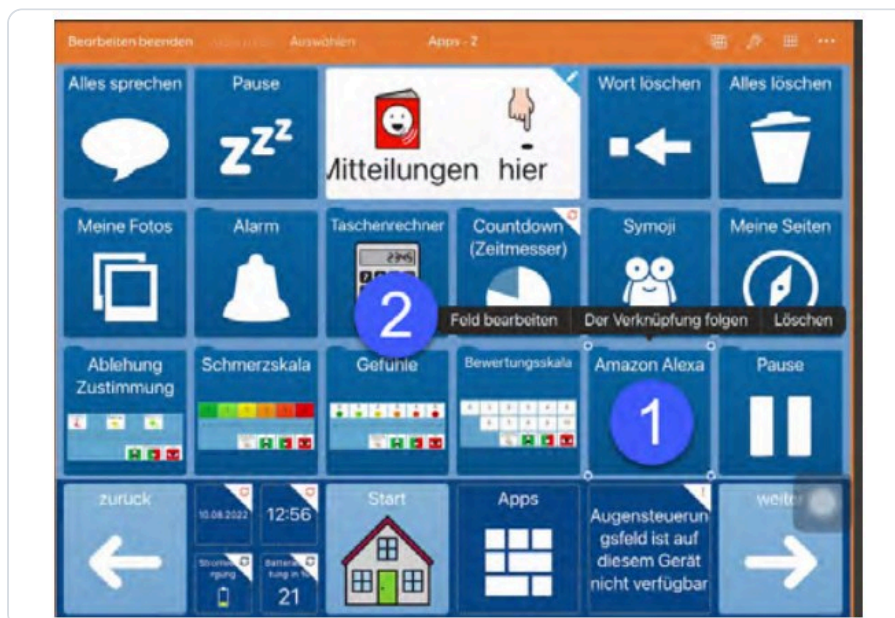


Das Feld auswählen und „Feld bearbeiten“ wählen

- 3 Das Feld wird vergrößert dargestellt. Rechts oben (neben **Befehle**) auf **Eigenschaften** (1) klicken.

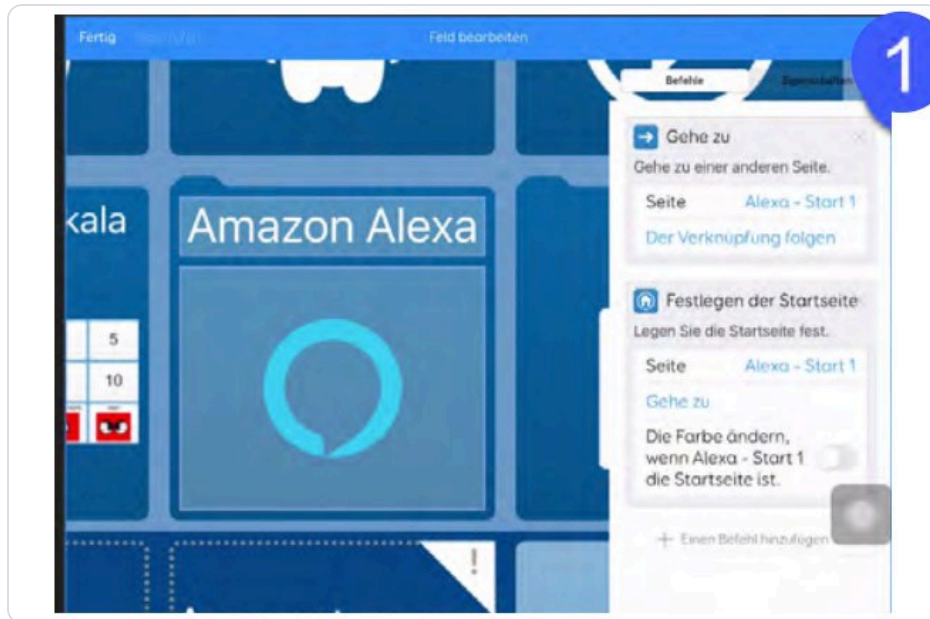

Rechts oben auf „Eigenschaften“ klicken

- 4 Nach unten scrollen, den Eintrag **Zugänglichkeit des Feldes** wählen und in der Liste **Versteckt** (1) wählen.

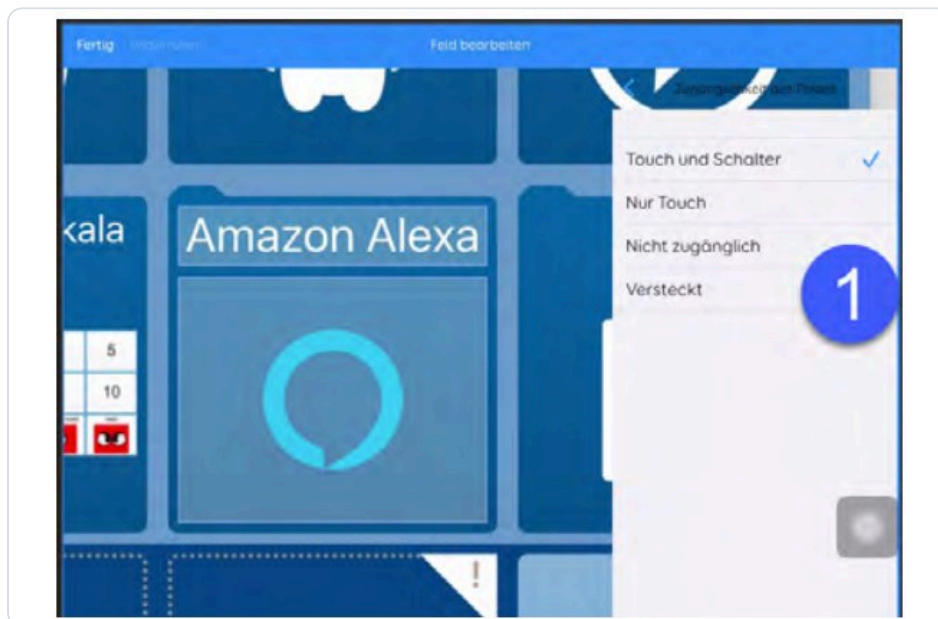

In der Liste „Versteckt“ wählen


- 5 Oben auf **Fertig** klicken, danach **Bearbeiten beenden** wählen.

Zum Einblenden gehen Sie denselben Weg und wählen unter **Zugänglichkeit des Feldes** wieder **Touch und Schalter**.

Ein einfaches Feld ändern

- 1 Die Seite öffnen, das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.
- 2 Das Feld auswählen und **Feld bearbeiten** wählen. Das Feld wird vergrößert dargestellt.

- 3 Die Zeile mit der Bezeichnung auswählen und den Text über die Tastatur eingeben (1).

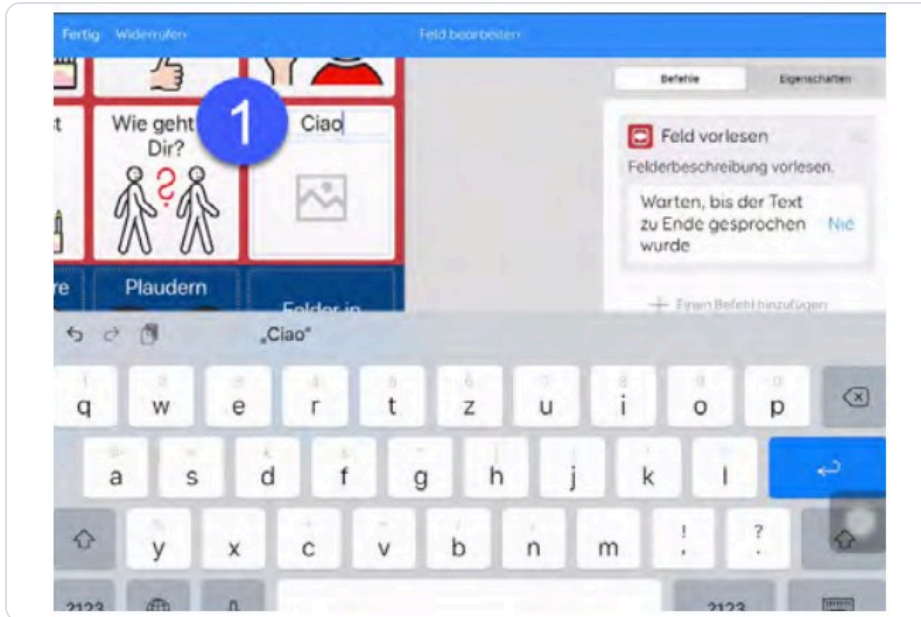

Die Bezeichnung über die Tastatur eingeben

- 4 In das Feld für die Bilder drücken und ein Bild auswählen (1). Unter **Bild finden** gibt es weitere Symbole, Fotos, Bilder aus dem Internet oder Aufnahmen mit der Kamera. Auf **Fertig** (2) drücken.



Ein Bild wählen und mit „Fertig“ bestätigen

- 5 **Bearbeiten beenden** wählen.

Tipp. Eigene Fotos machen viele Seiten erst richtig persönlich – vertraute Personen, Orte und Gegenstände werden schneller erkannt als jedes Symbol.

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Beobachtung	Mögliche Ursache	Was hilft
Das Feld „AssistUK“ erscheint beim Laden nicht	Keine Internetverbindung oder andere Sprache eingestellt	Verbindung prüfen, Sprache Deutsch (Deutschland) einstellen, Menü neu öffnen
Ein Feld spricht nicht	Lautstärke, oder das Feld ist ohne Inhalt	Gerätelautstärke prüfen; im Bearbeiten-Modus nachsehen, ob das Feld eine Bezeichnung hat
Änderungen sind wieder verschwunden	Bearbeiten wurde ohne Speichern beendet	Nach dem Ändern Bearbeiten beenden wählen und die Abfrage mit Ja bestätigen
Zu viele Felder überfordern	Rastergröße zu groß gewählt	Kleineres Raster laden oder einzelne Felder ausblenden (siehe „Anpassen“)
Ein wichtiges Wort fehlt	Easy ist bewusst reduziert	Das Wort als eigenes Feld ergänzen (siehe „Anpassen“)

HILFE UND KONTAKT

Bedienfragen beantworten wir kostenlos: **lars.tiedemann@assistuk.net**

Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Bildern gibt es im Hilfe-Bereich der Website. Fragen zur Versorgung, zu Konditionen und zum Bezug beantworten REHAVISTA und deren Partnerfirmen direkt.

MEHR ERFAHREN

Mit dem Handy die QR-Codes scannen – oder die Adressen direkt eingeben. Alle Angebote sind kostenlos.



Hilfe & Anleitungen

Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Störungshilfe
und alle Handbücher –
kostenlos.

assistuk.net/hilfe



Guter Gesprächspartner

Wie Gespräche gelingen:
warten können, echte
Fragen stellen, Zeit lassen.

assistuk.net/info/guter-gespraechs-partner



Easy im Netz

Die Produktseite:
Neuigkeiten, häufige
Fragen, alle Anleitungen.

assistuk.net/smartbox-grid/easy