

AssistUK EyeKeyBoard

Die Tastatur für Augensteuerung – schreiben mit den Augen, ohne
Fehlauflösungen.

Anleitung für Grid 3 (Windows) · Fassung 1 · Stand August 2026



INHALT

Was EyeKeyBoard ist	3
Für wen EyeKeyBoard passt	3
Was Sie brauchen	3
EyeKeyBoard laden	4
Grid 3 (Windows)	4
Aufbau: Die Tastatur	7
ABC oder QWERTZ	7
Die Pausenaktivierung	8
Anpassen	9
Grid 3 (Windows)	9
Wenn etwas nicht funktioniert	12
Hilfe und Kontakt	13
Mehr erfahren	14

WAS EYEKEYBOARD IST

AssistUK EyeKeyBoard ist eine Tastatur für Menschen, die Unterstützte Kommunikation (UK) nutzen und per Augensteuerung schreiben. Das Layout ist für die Blicksteuerung gestaltet: große, klar getrennte Tasten mit ausreichend Abstand, damit Blickbewegungen präzise erkannt werden. Die automatische Pausenaktivierung verhindert unbeabsichtigte Mehrfachauswahl – für schnelles, ermüdungsarmes Schreiben.

Geschriebener Text wird per Sprachausgabe gesprochen – Buchstabe für Buchstabe oder als ganzer Satz. So wird die schriftliche Kommunikation hörbar.

Kurz gesagt. EyeKeyBoard ist die Tastatur, die zur Augensteuerung passt: große Tasten, eingebaute Pause, Wortvorhersage.

EyeKeyBoard gibt es ausschließlich für Grid 3 (Windows) – es nutzt die Augensteuerung unter Windows voll aus.

Für wen EyeKeyBoard passt

EyeKeyBoard richtet sich an Menschen,

- die per Augensteuerung kommunizieren und lesen und schreiben können,
- die mit einer Standard-Bildschirm tastatur zu viele Fehlauflösungen haben,
- die eine ergonomische, ermüdungsarme Lösung für das Schreiben mit den Augen suchen.

Schreiben ohne sichere Schriftsprache? Wer noch Erfahrungen mit Buchstaben sammelt, findet in Scripo Start passende Angebote; wer Symbol und Schrift kombiniert, in Scripo Pro. EyeKeyBoard richtet sich an sichere Schreiber:innen.

Was Sie brauchen


Software	Grid 3 (Windows)
Ansteuerung	eine eingerichtete Augensteuerung
Lizenz	AssistUK-Lizenz
Bezug	über REHAVISTA und deren Partnerfirmen

EYEKEYBOARD LADEN

Grid 3 (Windows)

Die Inhalte von AssistUK werden weiterentwickelt, ergänzt und online zur Verfügung gestellt. Bei bestehender Internetverbindung laden Sie EyeKeyBoard direkt in der Software.

- 1 Das Gerät mit dem Internet verbinden. Auf **Meine Seiten** gehen (1), oben das Menü öffnen (2) und **Seitensets hinzufügen** (3) wählen.

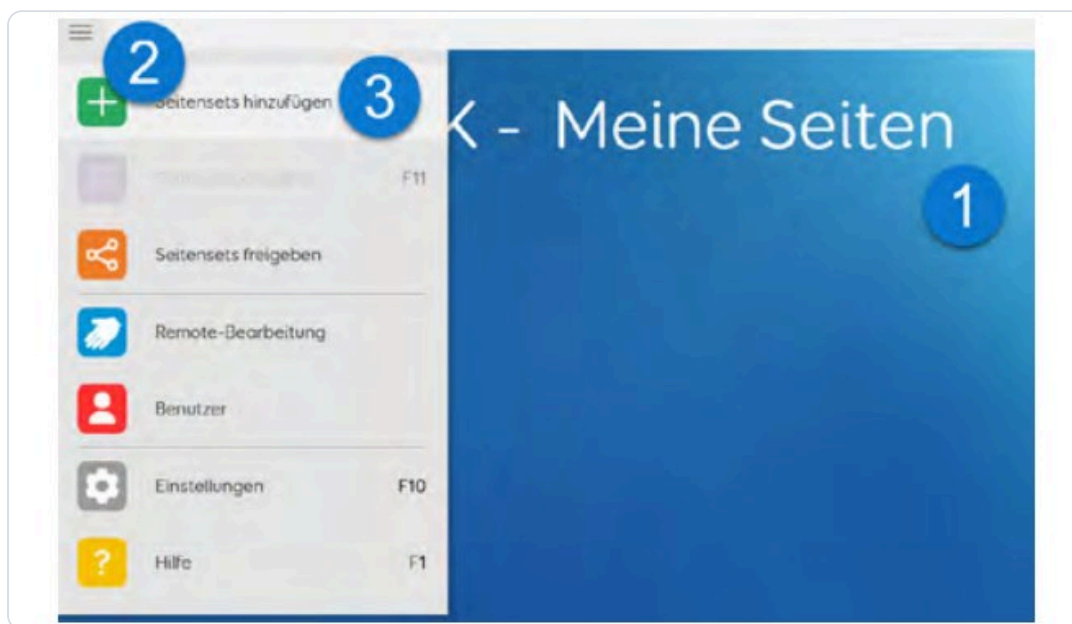


Über das Menü auf „Meine Seiten“: „Seitensets hinzufügen“

- 2 Einen Moment warten. Bei bestehender Internetverbindung und eingestellter Sprache **Deutsch** (Deutschland) erscheint das Feld **AssistUK** (1). Das Feld auswählen und auf **weiter** (2) klicken.



Das Feld „AssistUK“ auswählen und mit „weiter“ bestätigen

- 3 In der Liste den Bereich **EyeKeyBoard** wählen (1) und auf **weiter** (2) klicken.

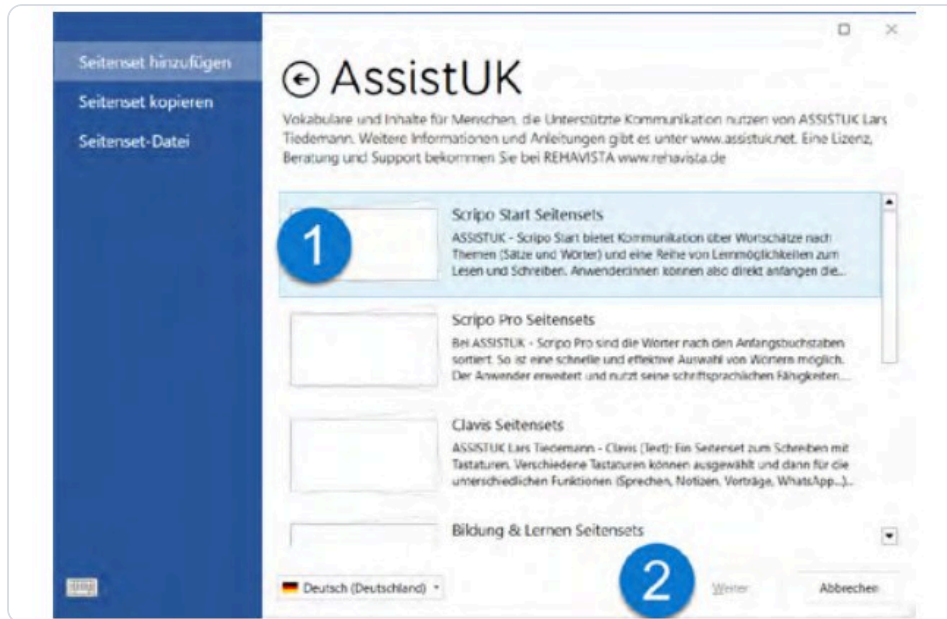


In der Liste den gewünschten Bereich wählen – die Abbildungen zeigen als Beispiel Scripo Start

- 4 Das gewünschte Seitenset wählen (1) und auf **weiter** (2) klicken.



Das gewünschte Seitenset auswählen (Beispiel Scripo Start)

- 5 Unten auf **Hinzufügen** (1) klicken.

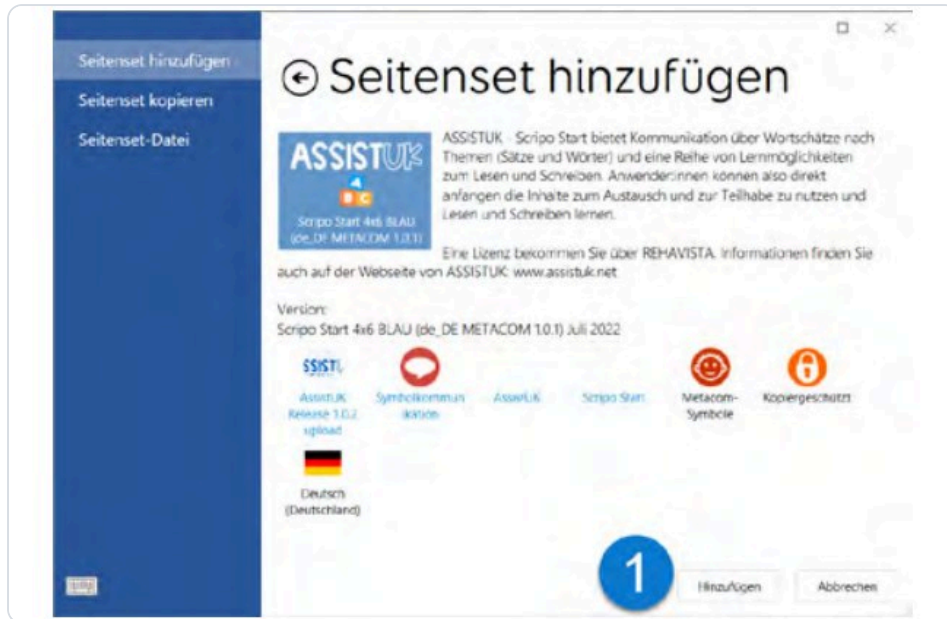

Mit „Hinzufügen“ wird das Seitenset geladen (Beispiel Scripo Start)

Das Seitenset wird geladen und zu „Meine Seitensets“ hinzugefügt. Es kann direkt geöffnet werden. Außerdem können weitere Seitensets geladen werden.

Wenn das Feld „AssistUK“ nicht erscheint. Prüfen Sie die Internetverbindung und die eingestellte Sprache Deutsch (Deutschland) . Danach das Menü schließen und neu öffnen – die Liste wird neu geladen.

AUFBAU: DIE TASTATUR



EyeKeyBoard (QWERTZ): oben das Mitteilungsfenster, darunter Satzanfänge und Vorhersage, dann die Tastatur

Die Tastatur ist in drei Zonen gegliedert:

- **Oben das Mitteilungsfenster** mit `Alles sprechen`, `Rücktaste`, `Wort löschen` und `Bearbeiten` – hier entsteht der Text.
- **Darunter die Vorhersagezeile:** häufige Satzanfänge und die Wortvorhersage. Häufig genutzte Wörter werden priorisiert – das spart viele Eingaben.
- **Das Tastenfeld** mit großen, klar getrennten Tasten. Häufige Buchstabenverbindungen wie `pf`, `sch`, `sp` und `st` liegen als eigene Tasten bereit.

ABC oder QWERTZ

EyeKeyBoard gibt es in zwei Belegungen: **QWERTZ** für alle, die die Computer-Tastatur kennen, und **ABC** in alphabetischer Reihenfolge für alle, denen das Alphabet vertrauter ist. Wählen Sie beim Laden die Fassung, die zur Person passt – beide können auch nebeneinander geladen und ausprobiert werden.

DIE PAUSENAKTIVIERUNG

Das Kernstück von EyeKeyBoard: Nach jeder Eingabe legt die Tastatur automatisch eine kurze Pause ein. Der Blick kann auf der Taste ruhen bleiben, ohne dass der Buchstabe doppelt geschrieben wird – die häufigste Fehlerquelle beim Schreiben mit den Augen.

- **Weniger Korrekturen:** Unbeabsichtigte Mehrfachauswahl wird verhindert, das ständige Löschen entfällt.
- **Weniger Anstrengung:** Der Blick muss nicht nach jeder Eingabe hektisch von der Taste springen.
- **Individuell einstellbar:** Die Verweilzeit (wie lange der Blick ruhen muss, bis eine Taste auslöst) wird in den Grid-3-Einstellungen für die Augensteuerung an die Person angepasst.

Verweilzeit finden. Beginnen Sie eher langsam und verkürzen Sie schrittweise. Eine Verweilzeit, die sicher trifft, ist schneller als eine kurze, die Korrekturen erzwingt.

ANPASSEN

Grid 3 (Windows)

Felder ausblenden und einblenden

In Grid können Sie Felder ein- und ausblenden. So lässt sich eine Seite vereinfachen, ohne etwas zu löschen – das Einblenden ist später wieder möglich.

- 1 Die Seite öffnen, auf der ein Feld ausgeblendet werden soll. Oben das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.



Das Menü öffnen und „Seite bearbeiten“ wählen

- 2 Das Feld auswählen. Oben im Menü unter **Zugänglichkeit des Feldes** die Option **Versteckt** wählen. An dieser Stelle können weitere Felder ausgeblendet werden.



Unter „Zugänglichkeit des Feldes“ die Option „Versteckt“ wählen

- 3 **Bearbeiten beenden** wählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Zum Einblenden gehen Sie denselben Weg und wählen unter **Zugänglichkeit des Feldes** wieder **Voll zugänglich**.

Ein einfaches Feld ändern

Auf einem einfachen Feld sind die Bezeichnung (der Text) und das Bild (Symbol oder Foto) fest gespeichert. So ändern Sie beides:

- 1 Die Seite öffnen, oben das Menü öffnen und **Seite bearbeiten** wählen.

- 2 Das Feld auswählen (1), Beschriftung ändern (2) wählen und den Text über die Tastatur eingeben.



Feld auswählen und „Beschriftung ändern“ wählen

- 3 Passende Bilder werden oben vorgeschlagen (2) und können direkt gewählt werden. Weitere Symbole oder eigene Fotos gibt es über Bild finden (3).



Vorgeschlagenes Bild wählen oder über „Bild finden“ suchen

- 4 Bearbeiten beenden wählen und das Speichern mit Ja bestätigen.

Tipp. Eigene Fotos machen viele Seiten erst richtig persönlich – vertraute Personen, Orte und Gegenstände werden schneller erkannt als jedes Symbol.

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Beobachtung	Mögliche Ursache	Was hilft
Das Feld „AssistUK“ erscheint beim Laden nicht	Keine Internetverbindung oder andere Sprache eingestellt	Verbindung prüfen, Sprache Deutsch (Deutschland) einstellen, Menü neu öffnen
Buchstaben werden doppelt geschrieben	Verweilzeit zu kurz eingestellt	Verweilzeit in den Grid-3-Einstellungen der Augensteuerung verlängern
Tasten lösen aus, ohne dass sie gemeint waren	Kalibrierung passt nicht mehr	Augensteuerung neu kalibrieren – Sitzposition und Abstand prüfen
Das Schreiben ermüdet schnell	Verweilzeit, Sitzposition oder Bildschirmabstand passen nicht	Kürzere Schreibphasen, Position prüfen, Verweilzeit anpassen – und die Wortvorhersage konsequent nutzen
Die Vorhersage schlägt unpassende Wörter vor	Die Vorhersage lernt mit	Häufig genutzte Wörter setzen sich mit der Zeit nach vorne
Geschriebenes wird nicht gesprochen	Lautstärke oder Sprachausgabe	Gerätelautstärke und die eingestellte Stimme in Grid 3 prüfen

HILFE UND KONTAKT

Bedienfragen beantworten wir kostenlos: **lars.tiedemann@assistuk.net**

Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Bildern gibt es im Hilfe-Bereich der Website. Fragen zur Versorgung, zur Augensteuerungs-Hardware und zum Bezug beantworten REHAVISTA und deren Partnerfirmen direkt.

MEHR ERFAHREN

Mit dem Handy die QR-Codes scannen – oder die Adressen direkt eingeben. Alle Angebote sind kostenlos.



Hilfe & Anleitungen

Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Störungshilfe
und alle Handbücher –
kostenlos.

assistuk.net/hilfe



Guter Gesprächspartner

Wie Gespräche gelingen:
warten können, echte
Fragen stellen, Zeit lassen.

assistuk.net/info/guter-gespraechs-partner



EyeKeyBoard im Netz

Die Produktseite:
Neuigkeiten, häufige
Fragen, alle Anleitungen.

assistuk.net/smartbox-grid/eyekey-board