


AssistUK GazeTo

Augensteuerung lernen – 197 Aktivitäten in 7 Stufen, mit Einschätzung und Verlauf.

Anleitung für den Browser (Computer, Tablet, Smartphone) · Fassung 1 · Stand August 2026

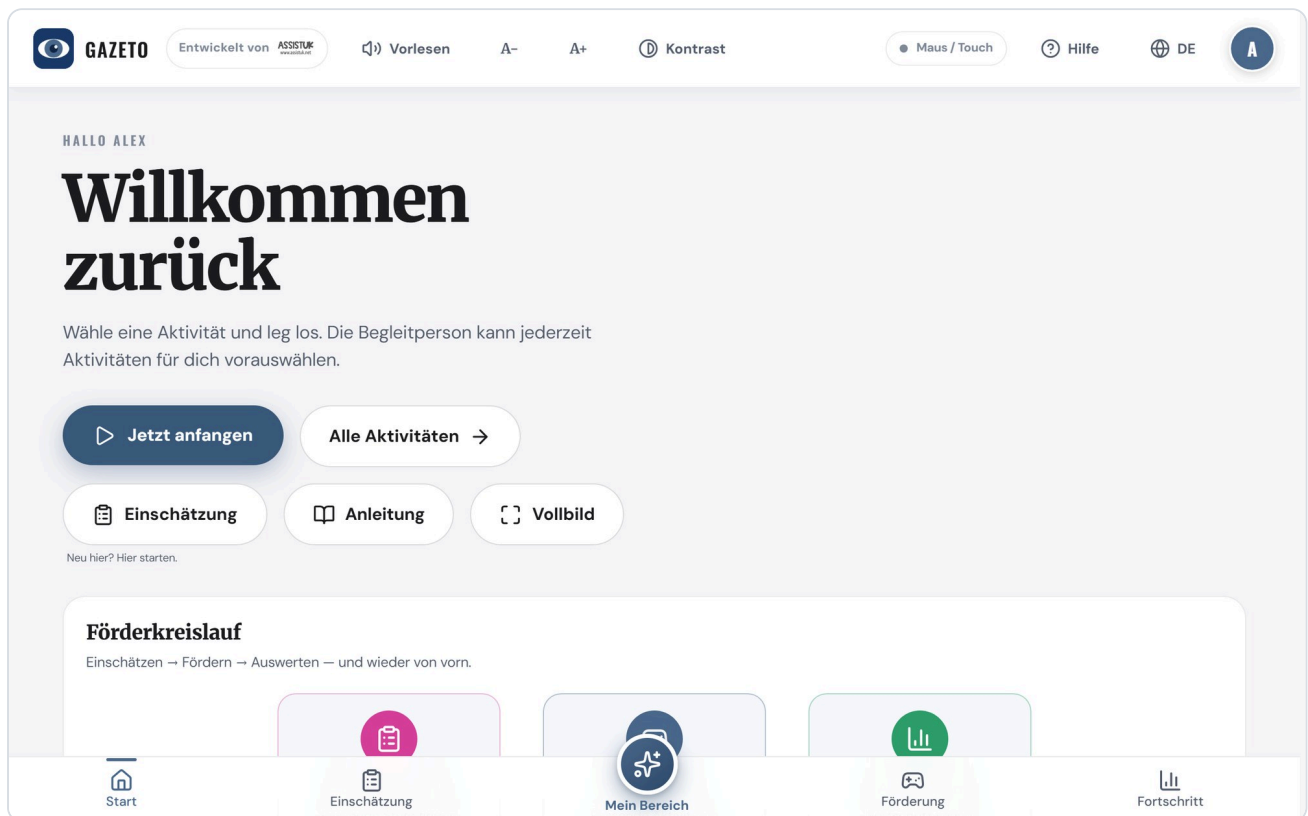

INHALT

Was GazeTo ist	3
Was Sie brauchen	3
GazeTo starten	4
Die sieben Stufen	6
Die Augensteuerung einrichten	8
Einschätzung und Verlauf	10
Szenenbilder: die Schwester-App SceneTalk	11
Daten und Sicherung	12
Wenn etwas nicht funktioniert	13
Hilfe und Kontakt	14
Mehr erfahren	15

WAS GAZETO IST

GazeTo ist eine kostenlose Browser-App für das systematische Lernen der Augensteuerung – für Menschen, die Unterstützte Kommunikation (UK) nutzen oder auf dem Weg dorthin sind. Grundlage ist ein Kompetenzaufbau in **sieben Stufen**: von ersten Ursache-Wirkungs-Erfahrungen bis zu komplexen Spielen und Kommunikationsaktivitäten. Innerhalb dieses Rahmens stehen **197 Aktivitäten** bereit.

Der Blick steht im Mittelpunkt, aber nicht allein: Alle Aktivitäten lassen sich auch per Touch und Maus bedienen – zum Kennenlernen, zum Vormachen und für gemischte Gruppen. GazeTo läuft direkt im Browser, muss nicht installiert werden und funktioniert nach dem ersten Laden auch ohne Internet. Alle Daten bleiben auf dem Gerät; es gibt Profile für mehrere Personen.

GazeTo richtet sich an Fachkräfte in Therapie und Pädagogik ebenso wie an Familien – die App dokumentiert Sitzungen, erzeugt Blick-Heatmaps und begleitet mit einer strukturierten Einschätzung.

Kurz gesagt. GazeTo macht aus „Augensteuerung üben“ einen gangbaren Weg: sieben Stufen, passende Aktivitäten, sichtbarer Fortschritt.

Was Sie brauchen

Gerät	Computer oder Tablet mit aktuellem Browser
Adresse	gazeto.assistuk-apps.net
Für die Augensteuerung	eine Augensteuerung, die den Mauszeiger bewegt (z. B. am Kommunikationsgerät) – oder die eingebaute Webcam-Blickverfolgung
Kosten	keine – ohne Konto, ohne Anmeldung


GAZETO STARTEN

Beim ersten Start begrüßt GazeTo Sie mit einer Einführung in vier Schritten: Sprache wählen, Funktionen kennenlernen, Profil anlegen. Das Profil trägt Namen und Einstellungen der Person – weitere Profile können jederzeit dazukommen.



Schritt 1 von 4: Sprache wählen – die Oberfläche gibt es in 101 Sprachen

Danach landet die Person auf der Startseite. Von hier führen die großen Knöpfe direkt los: **Jetzt anfangen** schlägt passende Aktivitäten vor, **Alle Aktivitäten** öffnet die Übersicht, **Einschätzung** startet die geführte Einschätzung.

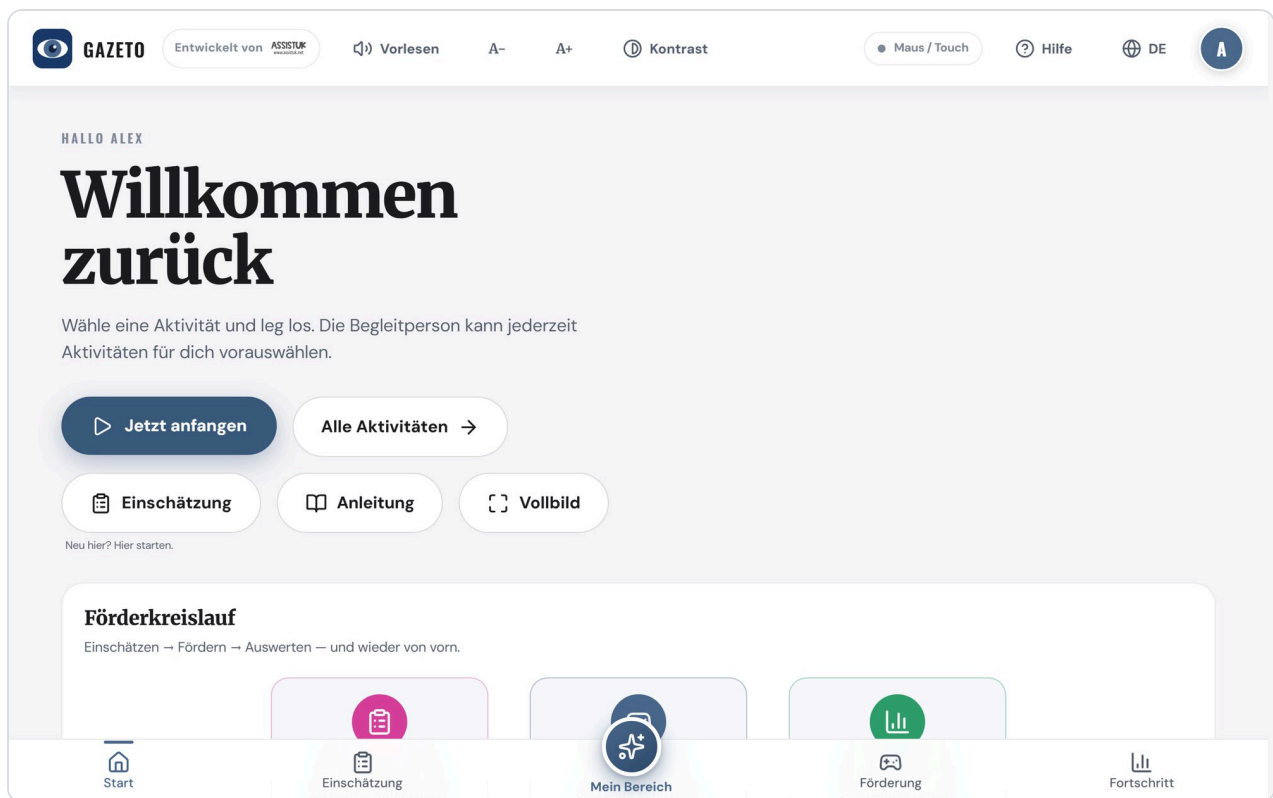

Die Startseite: Jetzt anfangen, Alle Aktivitäten, Einschätzung – unten der Förderkreislauf

Einführung noch einmal ansehen? Einstellungen → Karte „Einführung“ → Einführung erneut ansehen .

DIE SIEBEN STUFEN


Jede Stufe baut auf der vorherigen auf. Welche Stufe passt, zeigt die Einschätzung – oder das gemeinsame Ausprobieren:

Stufe	Name	Worum es geht
1	Entdecken	Jeder Blick löst sichtbar etwas aus – Farben, Licht, Klang. Keine Zielgenauigkeit nötig.
2	Erkunden	Den Bildschirm aktiv absuchen; große Bereiche ansteuern.
3	Finden	Bestimmte Ziele ansehen – auch bewegliche.
4	Wählen	Aus mehreren Möglichkeiten bewusst eine auswählen.
5	Steuern	Den Blick gezielt lenken; erste Raster wie auf einer Kommunikationstafel.
6	Anwenden	Mehrschrittige Aufgaben, Navigation, räumliche Orientierung.
7	Meistern	Spiele gegen den Computer und Kommunikationsaktivitäten – die höchste Motivationsebene.


The screenshot shows the GAZETO app interface. At the top, there's a header with the GAZETO logo, 'Entwickelt von ASSISTUK', and various settings like 'Vorlesen', 'A-', 'A+', 'Kontrast', 'Maus / Touch', 'Hilfe', 'DE', and a user profile icon. Below the header, the main content area is titled 'FÖRDERUNG' and '197 Aktivitäten über 7 Stufen.' A sub-header explains: 'Stöbere durch alle Aktivitäten nach Stufe. Jede Stufe baut auf der vorherigen auf – wähle oben eine Stufe oder entdecke alle.' Below this, there's a section for 'Szenenbilder gibt es in SceneTalk' with a description: 'Echte Fotos mit sprechenden Stellen – erstellen und nutzen in SceneTalk, der kostenlosen Schwester-App.' Underneath, there's a 'ZIELGRUPPE' filter section with buttons for 'Alle', 'Kind', 'Teenager', 'Erwachsene', and 'Senioren'. Below that, there's a row of buttons for each level: 'Alle (197)', 'Stufe 1 · Entdecken (34)', 'Stufe 2 · Erkunden (36)', 'Stufe 3 · Finden (29)', 'Stufe 4 · Wählen (38)', 'Stufe 5 · Steuern (26)', 'Stufe 6 · Anwenden (18)', and 'Stufe 7 · Meistern (16)'. At the bottom, there's a row of five activity cards, each with a star icon and a 'S1' label. The bottom navigation bar has five icons: 'Start', 'Einschätzung', 'Mein Bereich' (highlighted), 'Förderung', and 'Fortschritt'.

Alle 197 Aktivitäten, gefiltert nach Stufe und Zielgruppe – von Kind bis Senior:in

Jede Aktivität hat eine eigene Seite mit Beschreibung, Schwierigkeit und Dauer – hier stellt die Begleitung ein, bevor es losgeht:

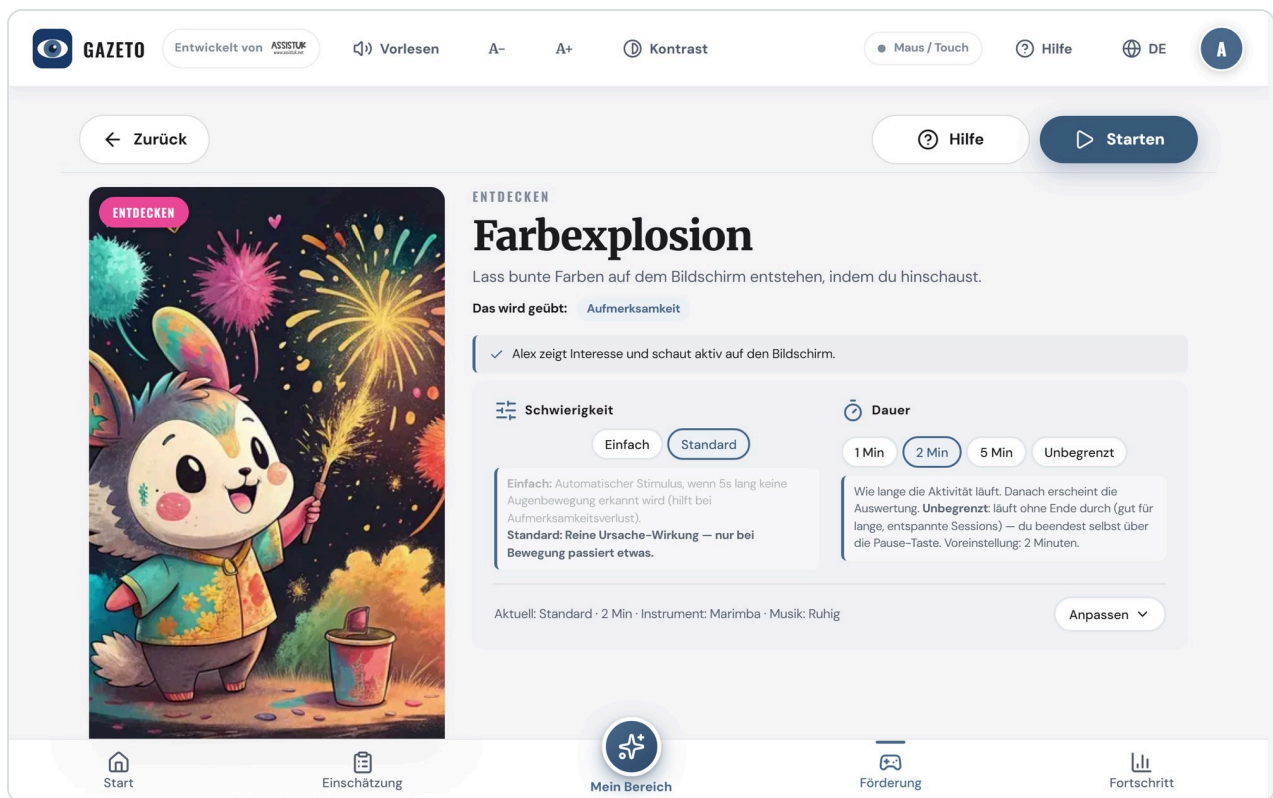

Vor dem Start: Schwierigkeit und Dauer wählen, dann „Starten“

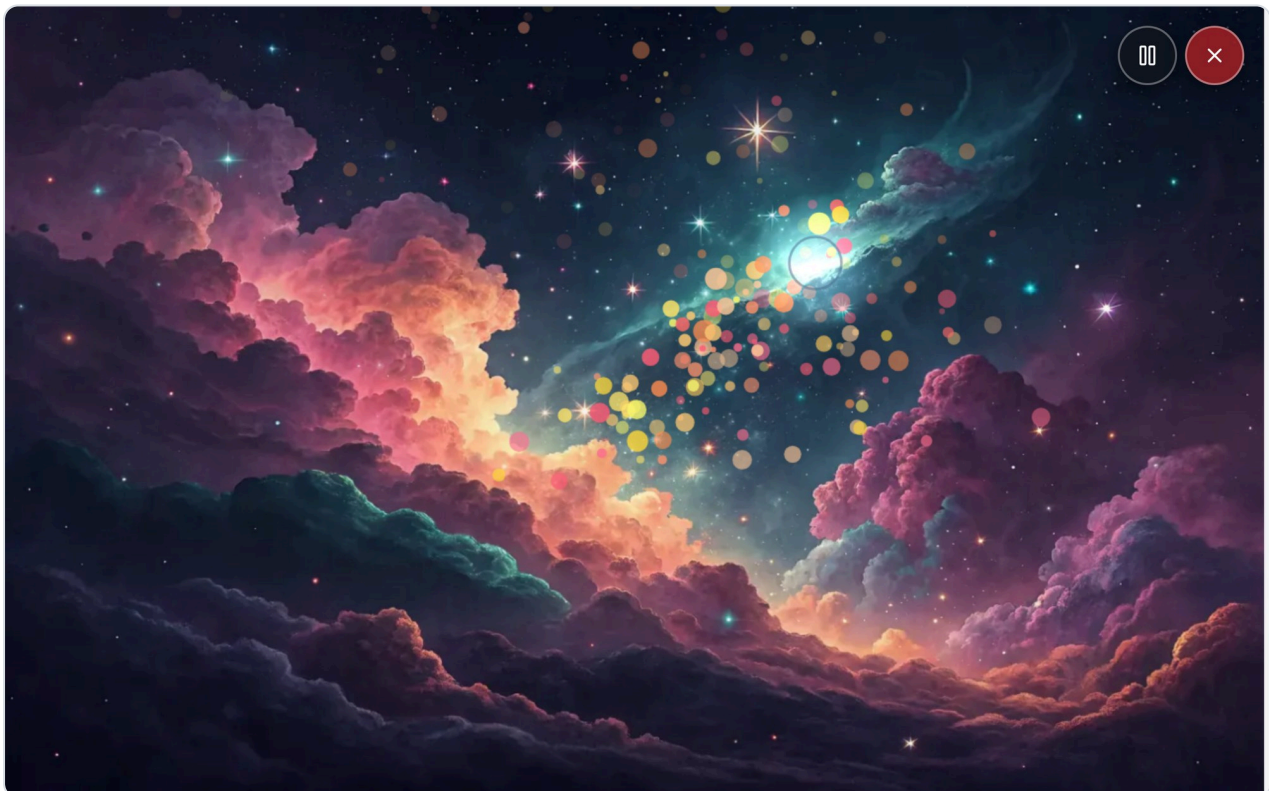


Stufe 1, „Farbexplosion“: Wo der Blick hinfällt, entstehen Farben – Pause und Beenden oben rechts

DIE AUGENSTEUERUNG EINRICHTEN

Der wichtigste Satz zur Einrichtung: **Stellen Sie die Augensteuerung auf reine Zeiger-Bewegung ein, ohne eigenen Klick und ohne eigenes Verweilen.** GazeTo nutzt die Zeigerposition und übernimmt das Auswählen selbst – über die Verweildauer, die Sie in GazeTo einstellen. So gibt es genau ein Verweil-System, nicht zwei, die sich gegenseitig auslösen.

In den Einstellungen, Karte „Eingabe“:

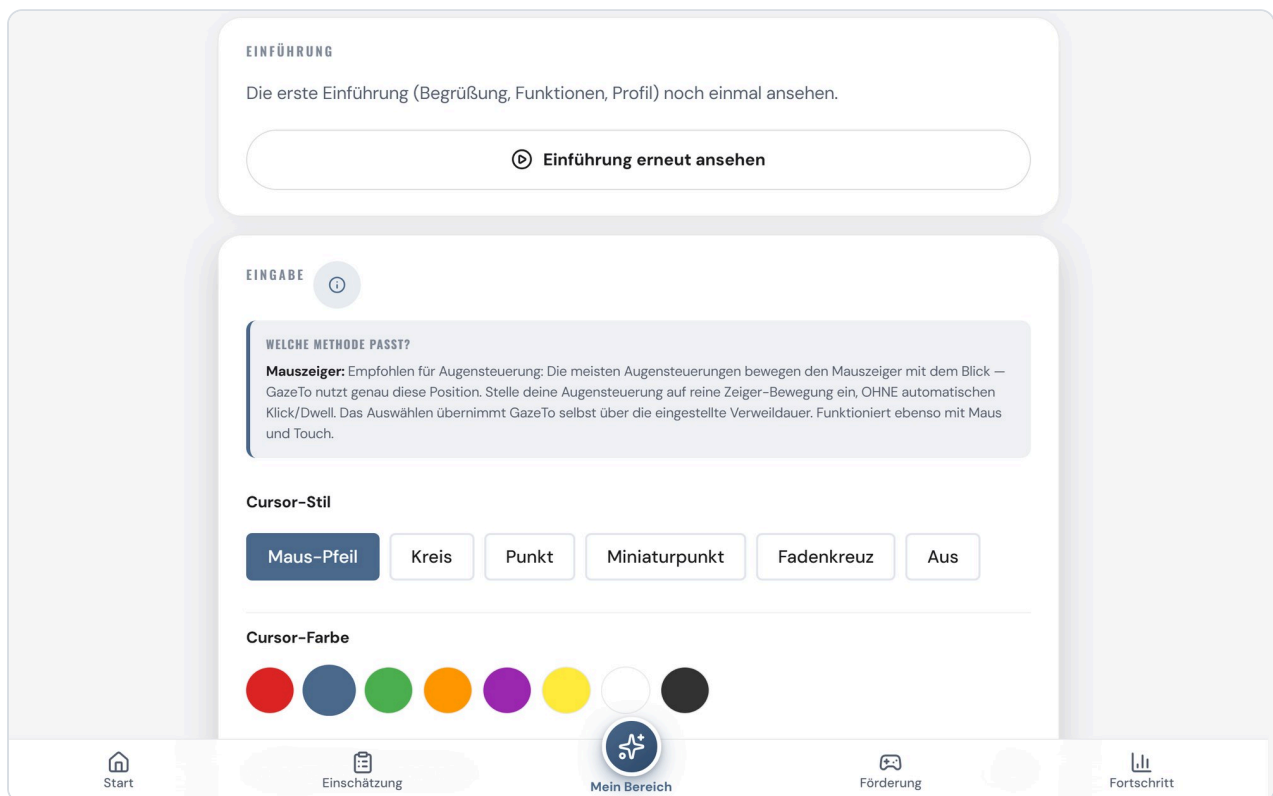

Die Eingabe-Karte: Empfehlung zur Methode, Cursor-Stil und Cursor-Farbe – darunter Verweildauer und Verweil-Anzeige


- **Eingabemethode:** Mauszeiger (empfohlen für Augensteuerungen), Touchscreen, Webcam-Blickverfolgung oder Taster.
- **Verweildauer:** stufenlos, mit den Vorgaben Kurz (0,5 s), Mittel (0,8 s) und Lang (1,2 s). Im Zweifel länger beginnen.
- **Verweil-Anzeige:** Ring, Uhr, schrumpfender Punkt, Balken oder Puls – gut sichtbar, wo der Blick gerade sammelt.
- **Cursor:** Stil, Größe und Farbe des Blickpunkts – oder ganz aus.
- **Webcam-Blickverfolgung:** die eingebaute Alternative ohne zusätzliche Hardware. Einmal kalibrieren, auf ruhiges Licht achten – als Einstieg und zum Ausprobieren gedacht, nicht als Ersatz für eine echte Augensteuerung.
- **Taster:** automatisches oder manuelles Scanning mit einstellbarem Tempo.

Zwei Begleit-Funktionen verdienen besondere Erwähnung:

- **Vormachen (Modeling-Modus):** Ein großer Ring folgt Maus oder Finger der Begleitperson – die lernende Person sieht, wohin gesteuert wird.
- **Mein Bereich sperren:** macht den Nutzerbereich zum geschützten Modus. Die Person kann nicht versehentlich hinausnavigieren; die Begleitung verlässt ihn über langes Drücken.

EINSCHÄTZUNG UND VERLAUF

GazeTo begleitet die Förderung in einem Kreislauf: **einschätzen** → **fördern** → **auswerten** → **neu einschätzen**. Die geführte Einschätzung ordnet ein, welche Stufe und welche Rastergröße aktuell passen, und schlägt konkrete nächste Schritte vor. Nach jeder Aktivität entsteht automatisch eine **Blick-Heatmap**: Sie zeigt, wo der Blick war – systematisches Absuchen, Hängenbleiben, Fixationsstabilität – und dokumentiert Fortschritt über die Zeit.

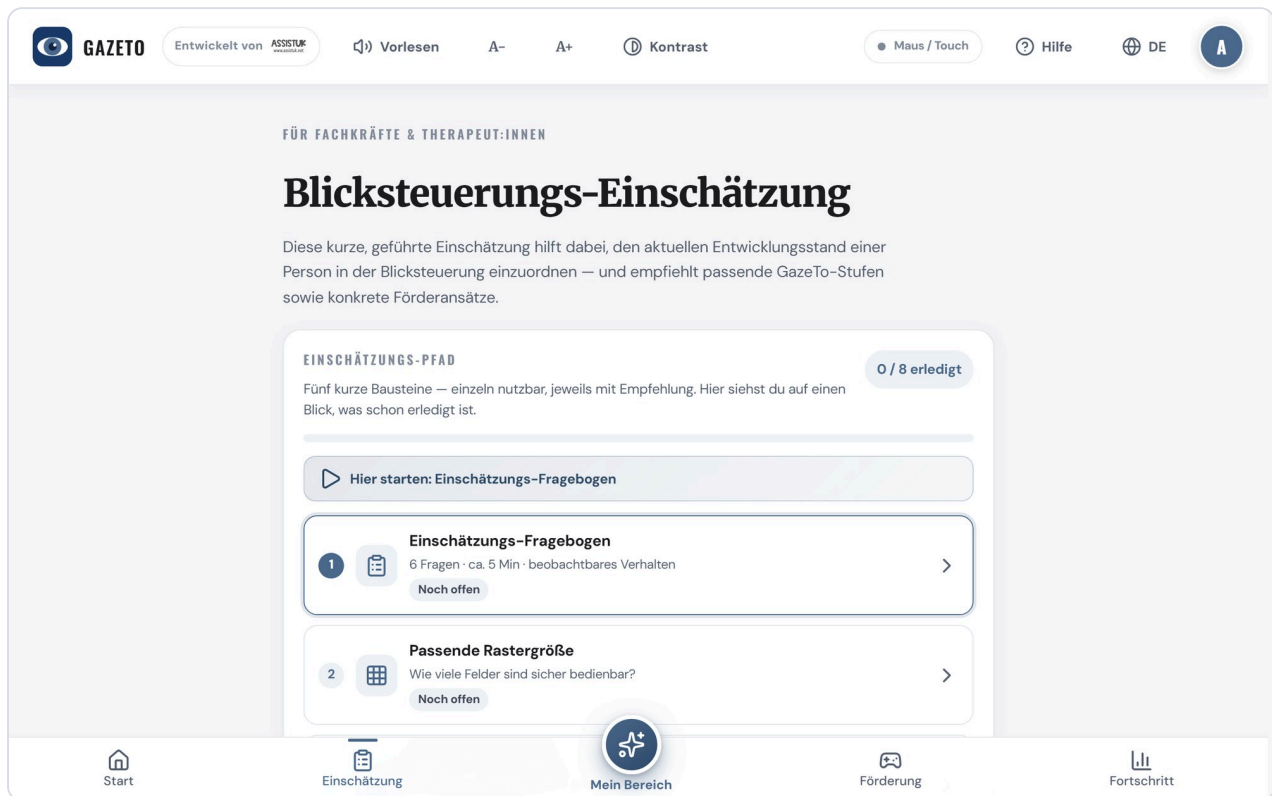

Die Blicksteuerungs-Einschätzung: kurze Bausteine, einzeln nutzbar, mit Empfehlung am Ende

Der Bericht verbindet die Einschätzung mit der Versorgungspraxis: Aus dem Fragebogen ergibt sich die passende Stufe des DAGG-3-Rahmenwerks, und der Bericht verlinkt direkt in den Vokabular-Finder auf assistuk.net – mit der Stufe bereits vorausgefüllt. Die Einschätzung ist eine strukturierte Beobachtung für die Förderplanung; sie ersetzt keine umfassende UK-Diagnostik.

SZENENBILDER: DIE SCHWESTER-APP SCENETALK

Szenenbilder – echte Fotos mit sprechenden Stellen – leben in der Schwester-App **SceneTalk**. Dort entstehen eigene Szenen mit eigenen Fotos und vertrauten Stimmen; GazeTo verweist an den passenden Stellen direkt hinüber. In GazeTo selbst bleiben Szenen-Aktivitäten für das Blicktraining, vom Kuckuck-Spiel bis zur Erzähl-Szene.

DATEN UND SICHERUNG

Alle Profile, Sitzungen und Einstellungen liegen ausschließlich auf dem Gerät – nichts wird übertragen. In den Einstellungen unter „Daten & Sicherung“:

- **Vollsicherung** schreibt alles in eine Datei (alle Profile, Verläufe, Einstellungen) – regelmäßig ausgeben und ablegen.
- **Einlesen** stellt eine Sicherung wieder her, auch auf einem anderen Gerät.

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Beobachtung	Mögliche Ursache	Was hilft
Es löst aus, ohne dass die Person es will	Die Augensteuerung klickt selbst UND GazeTo verweilt	Augensteuerung auf reine Zeiger-Bewegung stellen – auswählen soll nur GazeTo
Der Blick löst nichts aus	Verweildauer zu lang oder Anzeige unsichtbar	Verweildauer kürzen, Verweil-Anzeige auf Ring oder Uhr stellen
Die Webcam-Verfolgung springt	Licht zu unruhig oder Kalibrierung veraltet	Für gleichmäßiges Licht sorgen und neu kalibrieren
Die Person kommt aus dem Bereich heraus	„Mein Bereich sperren“ ist aus	In den Eingabe-Einstellungen einschalten
Fortschritt ist weg	Browserdaten wurden gelöscht oder anderes Gerät	Vollsicherung einlesen – und künftig regelmäßig sichern
Die App startet ohne Internet nicht	Sie wurde noch nie geladen	Einmal mit Internet öffnen; danach läuft sie offline

HILFE UND KONTAKT

Bedienfragen beantworten wir kostenlos: lars.tiedemann@assistuk.net

GazeTo bringt eine eigene bebilderte Anleitung mit (Startseite → [Anleitung](#)). Für die Frage, welche Augensteuerungs-Hardware zu einer Person passt, sind die Fachberatung und der versorgende Fachbetrieb die richtigen Ansprechpartner.

MEHR ERFAHREN

Mit dem Handy die QR-Codes scannen – oder die Adressen direkt eingeben. Alle Angebote sind kostenlos.



Hilfe & Anleitungen

Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Störungshilfe
und alle Handbücher –
kostenlos.

assistuk.net/hilfe



Guter Gesprächspartner

Wie Gespräche gelingen:
warten können, echte
Fragen stellen, Zeit lassen.

assistuk.net/info/guter-gespraechs-partner



GazeTo im Netz

Die Produktseite:
Neuigkeiten, häufige
Fragen, alle Anleitungen.

assistuk.net/apps/gazeto



Kurs: Technik und Zugang

Wie Menschen zu ihrer
Ansteuerung finden –
kostenlos, ohne
Anmeldung.

assistuk.net/hilfe/kurs/technik-und-zugang